

## **Guide de prise en main rapide**

### **Lecteur DAISY Victor Reader Stratus 4M**

*Réf. 24500*



Version Décembre 2011

## Table des matières :

<b>1. Objectif de ce guide</b>	<b>2</b>
<b>2. Avertissement important.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Branchement de l'appareil .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Description du Stratus 4M avec cache-touches .....</b>	<b>3</b>
4.1 – Cinq touches essentielles à repérer .....	3
4.2 – Tonalité, volume, vitesse .....	4
4.3 – Heure, date et mise en sommeil .....	4
4.4 – Tranche droite.....	6
4.5 – Mode Description de touches .....	7
<b>4. Garantie : .....</b>	<b>8</b>

### **1. Objectif de ce guide**

Le présent document a pour but de vous présenter succinctement ce lecteur DAISY Victor Reader Stratus 4M (M pour multimédia) et de vous donner les notions de base sur son utilisation. Après sa lecture, vous serez en mesure d'écouter le CD fourni qui contient le guide d'utilisateur complet, à l'intérieur duquel vous pourrez naviguer rapidement de chapitre en chapitre et de titre en titre.

### **2. Avertissement important**

Le Stratus 4M est livré avec un cache-touches amovible destiné à occulter certaines touches qui donnent accès à des fonctions avancées. Si vous avez une bonne sensibilité tactile et si vous vous sentez à l'aise avec les appareils de lecture DAISY, vous avez intérêt à retirer ce cache dont vous n'aurez plus besoin. Nous décrivons les sept touches rendues apparentes une fois le cache retiré après avoir abordé les fonctions de base.

### **3. Branchement de l'appareil**

Lors de votre première utilisation du Stratus 4M, il sera peut-être nécessaire de charger la batterie. Une charge minimale est nécessaire avant que l'appareil ne puisse fonctionner.

La prise d'alimentation se trouve sur la face arrière du Stratus 4M, vers la droite. Aucune erreur n'est possible, c'est la seule prise présente sur cette face. Insérez-y la fiche du câble correspondant et branchez la prise secteur dans une prise de courant.

L'autonomie maximale lorsque la batterie est pleinement chargée peut atteindre 10 heures. La durée pour une charge maximale est de 4 heures.

Pour connaître le pourcentage de charge de la batterie, appuyez sur la touche Info ; elle est située au centre de l'appareil, entre les quatre touches de navigation, mais n'est apparente que si le cache-touches a été retiré.

### **4. Description du Stratus 4M avec cache-touches**

Placez l'appareil à plat, avec la poignée à gauche.

Sur la face supérieure, à l'arrière et dans l'angle supérieur gauche de l'appareil se trouve le haut-parleur, dans un cercle en creux.

#### **4.1 – Cinq touches essentielles à repérer**

- À l'extrême droite et au centre (la seule touche en creux) : la touche de mise sous tension, Maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour allumer l'appareil. Un signal sonore est émis, puis un message de bienvenue est prononcé après une quinzaine de secondes. Si un CD est inséré, la lecture du livre commence automatiquement à la position mémorisée lors de la dernière utilisation (au début si c'est la première mise en route) ;
- à l'avant et à droite de l'appareil : de gauche à droite, les touches Recul rapide, Écoute/Arrêt et Avance rapide. La touche du milieu est arrondie vers l'intérieur : appuyez sur cette touche pour faire

une pause, appuyez à nouveau pour relancer la lecture. Les deux touches qui l'entourent sont en forme de flèches : un appui bref recule ou avance de quelques mots dans le livre, un appui prolongé recule ou avance rapidement avec annonce du pourcentage qui augmente progressivement ;

- enfin, toujours vers l'avant mais à l'extrême gauche, au niveau du boîtier : la touche Éjecter. Appuyez sur cette touche pour extraire un CD du lecteur (la position courante de lecture dans le livre est toujours sauvegardée).

Sur la tranche de devant du Stratus 4M se trouve la fente du lecteur de CD : introduisez un CD dans cette fente, face enregistrée vers le sol. Le mécanisme entraînera alors le CD vers l'intérieur.

Si le CD est à l'envers, il ressortira automatiquement après quelques secondes et vous n'aurez qu'à le réintroduire dans l'autre sens.

## **4.2 – Tonalité, volume, vitesse**

Tout à fait à l'arrière et à droite du Stratus 4M se trouve un bloc de six touches : les trois les plus vers l'arrière (touches « + ») servent à augmenter un réglage, les trois autres (touches « - ») à le diminuer.

- Les deux touches les plus à gauche règlent la tonalité,
- Les deux touches centrales règlent le volume (elles sont fléchées et surélevées par rapport aux quatre autres),
- Les deux touches de droite règlent la vitesse de lecture.

Chaque appui sur une touche augmente ou diminue le niveau et fait prononcer le niveau sélectionné ; un signal sonore spécifique est émis lorsque vous atteignez le niveau 0, qui est le réglage normal.

## **4.3 – Heure, date et mise en sommeil**

Derrière la touche Écoute/Arrêt (à l'avant de l'appareil) se situe une petite touche en forme de demi-cercle : c'est la touche Mise en sommeil.

Un appui bref annonce l'heure et la date ; les appuis successifs suivants sélectionnent un intervalle de temps après lequel l'appareil s'éteindra automatiquement ; pour désactiver la fonction, appuyez plusieurs fois séquentiellement sur cette touche.

Attention : un appui prolongé sur la touche **Mise en sommeil** ouvre un menu permettant de régler la date et l'heure ; appuyez brièvement à nouveau sur la touche pour quitter ce mode.

## Réglage de la date et de l'heure

Appuyez et maintenez la touche **Mise en sommeil** pour fixer la date et l'heure. Utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour vous déplacer dans le menu.

Les éléments qui composent le menu sont : Régler l'heure, Régler la date, Régler les paramètres avancés de l'heure.

Lorsque vous vous trouvez sur l'élément de votre choix, appuyez sur la flèche **Droite** pour ouvrir son menu.

Ce menu contient différents éléments de sous-menu. Les flèches **Droite** et **Gauche** sont utilisées pour se déplacer d'un sous-menu à un autre.

Utilisez les flèches **Haut** et **Bas** pour vous déplacer d'un réglage à un autre dans un sous-menu.

Utilisez la flèche **Droite** pour confirmer la sélection et aller au sous-menu suivant.

Lorsque vous atteignez le dernier sous-menu, l'appui de la flèche **Droite** confirmera vos réglages et vous retournera au menu.

À cette étape, appuyez sur la touche **Mise en sommeil** pour quitter. Vous pouvez également quitter sans enregistrer les modifications à tout moment en appuyant sur n'importe quelle autre touche.

## Liste des menus et sous-menus

- Régler l'heure : Heure, Minutes.
- Régler la date : Année, Mois et Jour.
- Régler les paramètres avancés de l'heure : Heure Format 12h/24h, Heure d'été.

Le réglage Heure d'été vous permet d'avancer ou de reculer d'une heure manuellement rapidement. Vous pouvez sélectionner manuellement l'heure normale ou l'heure d'été dans le sous-menu

Régler les paramètres avancés de l'heure.

**Remarque** : Ce réglage ne permet pas au lecteur de changer d'heure automatiquement à une date prédéterminée deux fois par année.

Par exemple :

Si vous désirez modifier le mois, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez et maintenez la touche **Mise en sommeil** jusqu'à ce que vous entendiez le message de menu.
- Appuyez une fois sur la flèche **Bas** pour atteindre le menu **Régler la date**.
- Appuyez sur la flèche **Droite** deux fois pour atteindre le sous-menu **Mois**.
- Appuyez plusieurs fois sur la flèche **Haut** ou **Bas** jusqu'à ce que vous atteigniez le mois approprié.
- Appuyez sur la flèche **Droite** pour vous déplacer au sous-menu suivant (jour).

Si vous ne voulez pas modifier le jour, appuyez sur la flèche **Droite** de nouveau pour atteindre la fin du menu **Régler la date**, à cette étape, tous les réglages effectués dans ce menu sont enregistrés.

#### 4.4 – Tranche droite

Sur le côté droit, de l'arrière vers l'avant : le lecteur de carte SD, le port USB et la prise jack pour écouteur ou casque.

**Remarque** : préférez de loin les cartes SD aux CD ! Elles contiennent beaucoup plus de données et l'accès à leur contenu est beaucoup plus rapide.

## 4.5 – Mode Description de touches

Si aucun CD ni aucune carte n'est insérée, le mode Description de touches est activé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour en connaître la fonction.

### ***Description du Stratus 4M sans le cache-touches***

Pour retirer le cache-touches :

- Tenez le lecteur en plaçant la poignée de transport dans la main gauche.
- Avec la main droite, trouvez le coin supérieur droit du Cache-touches. La languette se trouve au centre du coin.
- Placez le côté de l'index droit sous cette languette.
- En utilisant les pouces comme levier sur le côté du lecteur, appliquez une pression pour soulever légèrement la languette du bord du lecteur.
- Soulevez légèrement la languette du coin inférieur droit en utilisant la même méthode.
- Avec les deux coins surélevés, vous devriez être en mesure de retirer le Cache-touches. Au besoin, soulevez le coin inférieur gauche pour retirer le Cache-touches.

Pour remettre le cache-touches, placez-le sur l'appareil en le superposant de sorte que la partie arrondie se trouve en haut à gauche, juste au-dessus du haut-parleur. Appuyez ensuite sur le cache-touches pour qu'il s'enclenche.

Les touches qui deviennent visibles après l'extraction du cache-touches sont :

- En haut à gauche, sous le haut-parleur, la touche Catalogue, de forme carrée; elle sert à choisir un livre s'il y en a plusieurs sur un CD ou une carte SD.
- Sous la touche Catalogue, la touche Signets, en forme de losange, avec une protubérance tactile dans sa partie inférieure; elle sert à poser des repères dans un livre pour s'y déplacer rapidement par la suite.
- Au centre de l'appareil, quatre touches fléchées (Haut, Bas, Gauche, Droite); elles permettent de naviguer dans un livre (par

chapitre, par sous-chapitre, par titre, etc...), ainsi que de sélectionner un livre après avoir appuyé sur la touche Catalogue.

- Enfin, au centre des quatre touches fléchées, la touche Infos, de petite taille; elle donne des informations sur le titre du livre, la position courante dans le livre (temps écoulé et temps restant) et le niveau de batterie.

Vous êtes maintenant à même de découvrir les fonctions avancées du Stratus 4M décrites dans le guide d'utilisation sur CD livré avec votre appareil. Nous vous souhaitons d'agréables lectures !

#### **4. Garantie :**

Votre appareil est garanti 3 ans.

La garantie couvre l'appareil et la main-d'œuvre liée à la réparation à l'exception de la batterie et des accessoires fournis. Dans l'éventualité d'une défaillance, veuillez contacter le Service Après-vente de l'AVH en téléphonant au 01.44.49.27.37.

Note: Les termes de la garantie peuvent changer à tout moment.

#### **Conditions et Restrictions :**

Aucun remplacement ou entretien ne sera effectué sans une copie de la facture originale ou du bon de garantie original.

Veuillez conserver vos originaux.

Si l'appareil doit être envoyé, veuillez utiliser l'emballage d'origine.

Cette garantie s'applique à tous les cas où les dommages encourus ne sont pas le résultat d'une utilisation abusive, de négligences ou d'un cas fortuit.