

Guide d'utilisation

Loupe Electronique Adaptable

Réf. 26562

Léa



Décembre 2011

Table des matières :


1. Aperçu :	3
1.1 – Ouvrir la boîte et déballer les éléments.....	3
1.2 – Présentation physique de Léa :.....	4
2. Mise en route et utilisation :	5
2.1 – Charge de la batterie :.....	5
2.2 – Lecture avec la loupe	6
2.3 – Rappel des touches de fonctions :.....	7
2.3.1 – Changement de couleurs :.....	7
2.3.2 – Réglage de grossissement :.....	7
2.3.3 – Gel de l'image :	7
2.3.4 – Réglage de la luminosité.....	7
2.3.5 – Indication de batterie faible :	8
3. Ecrire avec la loupe.....	8
4. Raccordement de la loupe à un téléviseur :	9
5. Sécurité, maintenance et précautions :	10
6. Garantie :	11
7. Dépannage :	12

Félicitations pour l'achat de la Loupe Electronique Adaptable TV Léa.


Nous vous conseillons de prendre un moment pour lire attentivement cette notice afin de tirer le meilleur parti de votre loupe Léa.

1. Aperçu :


1.1 – Ouvrir la boîte et déballer les éléments

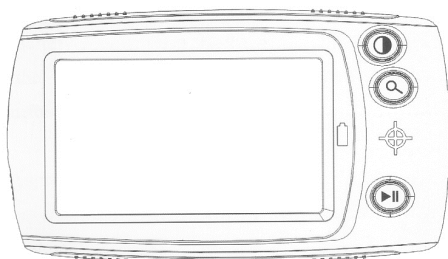

Loupe électronique Léa

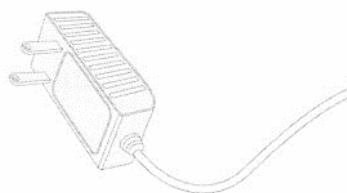


Adaptateur secteur

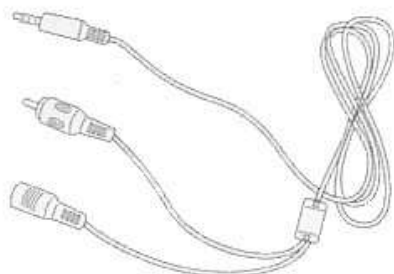


Câble vidéo
(pour la connexion à un téléviseur)



Mallette de transport
avec sangle d'épaule

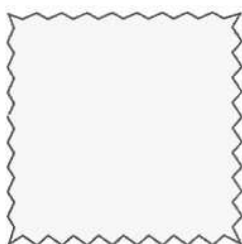


Chiffonnette

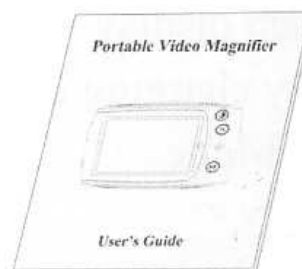

Manuel d'utilisateur

1.2 – Présentation physique de Léa :

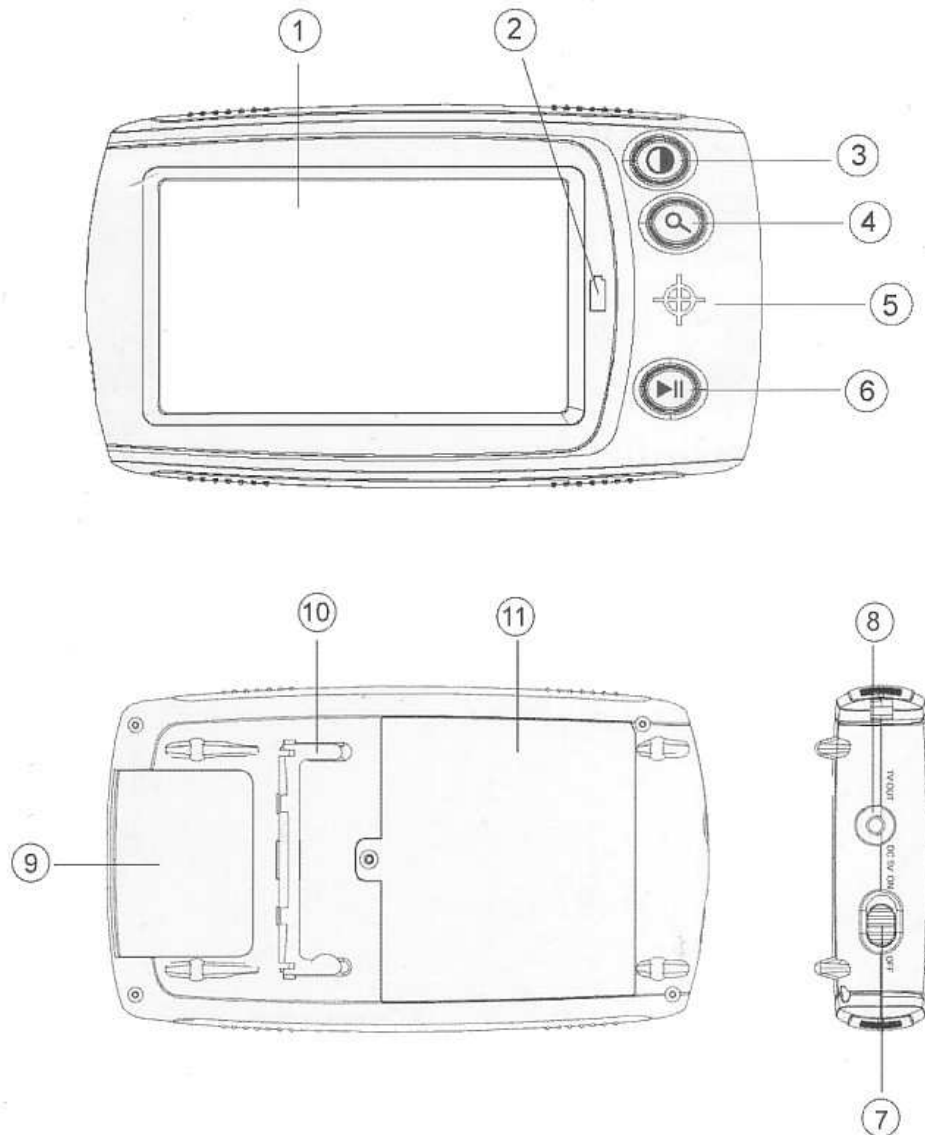


1. Ecran 4,3 pouces ou 11 cm de diagonale
2. Témoin de charge batterie
3. Changement des couleurs
4. Grossissement
5. Cible de lecture
6. Gel de l'image
7. Marche / Arrêt
8. Prise Alimentation et vidéo
9. Caméra
10. Pied d'écriture
11. Compartiment batterie


2. Mise en route et utilisation :

2.1 – Charge de la batterie :

Avant d'utiliser la loupe électronique Léa, vous devez recharger sa batterie.

1. Branchez la petite extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation et vidéo (8 sur le schéma ci-dessus) située sur le côté gauche de l'appareil. Notez que la petite extrémité de l'adaptateur s'apparente à une prise casque de type Jack 3,5 mm.
2. Ensuite, branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise secteur standard. L'indicateur de batterie LED (2 sur le schéma ci-dessus) près de l'écran apparaît en rouge pour montrer que la batterie se recharge.

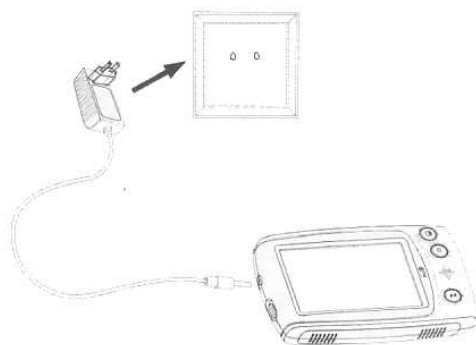






3. Lorsque la batterie a terminé le rechargement, l'indicateur de batterie LED apparaît en vert. Débranchez Léa de l'adaptateur secteur, l'indicateur de batterie LED s'éteint.
4. Vous pouvez à présent utiliser Léa jusqu'à quatre heures d'utilisation continue.
5. Lorsque la batterie atteint un niveau faible, un indicateur  de faible puissance clignote sur le coin supérieur droit de l'écran. Vous devez alors brancher l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.

Remarques importantes :

- Pendant le rechargement secteur, veillez à bien éteindre la loupe Léa.
- Si vous utilisez Léa avec l'adaptateur secteur branché, la batterie ne se recharge pas en même temps.

2.2 – Lecture avec la loupe


Pour lire avec la loupe, opérez comme suit :

1. Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur Marche / Arrêt (7 sur le schéma) situé sur le côté gauche de l'appareil à la position ON vers la prise adaptateur.
2. Placez les quatre pieds de Léa sur le texte que vous voulez lire.
3. Placez la cible de lecture  qui apparaît juste en dessous du bouton grossissement  (4 sur le schéma) sur l'emplacement approximatif où vous voulez commencer la lecture. Tout sous cette croix est magnifié et montré à l'écran.
4. Faites glisser Léa progressivement vers la droite pour lire la fin de la ligne. Faites glisser Léa vers le bas puis vers la gauche pour aller à la ligne suivante.
5. Pour changer le niveau de grossissement, appuyez sur le bouton grossissement  (4 sur le schéma).
6. Pour changer les couleurs utilisées à l'écran, appuyez sur le bouton  changement de couleurs (3 sur le schéma) jusqu'à ce que vous trouviez le mode le plus adapté à vos besoins de vision.
7. Pour figer l'image affichée, appuyez sur la touche Gel de l'image (6 sur le schéma)  . Appuyez de nouveau pour défiger l'image.

2.3 – Rappel des touches de fonctions :


Ceci reprend les trois touches de fonctions situées sur la droite de l'écran en commençant par celle du haut puis en descendant progressivement. Les deux premières touches sont de couleur jaune et plutôt rapprochées tandis que celle du bas est de couleur verte. Notez qu'entre les deuxième et troisième touches, une cible de lecture permet de visualiser l'endroit affiché par la caméra à l'écran.

2.3.1 – Changement de couleurs :

Appuyez sur le bouton changement de couleurs  pour faire défiler les sept différents modes :

- Pleine couleur
- Amélioration de l'image positive (noir sur blanc)
- Amélioration de l'image négative (blanc sur noir)
- Jaune sur fond noir
- Bleu sur fond jaune
- Bleu sur fond blanc
- Jaune sur fond bleu

2.3.2 – Réglage de grossissement :



Appuyez sur grossissement  pour faire défiler les quatre niveaux de grossissement.


2.3.3 – Gel de l'image :


Appuyez sur la touche Gel de l'image  pour figer l'image ou défiger l'image courante.

2.3.4 – Réglage de la luminosité :


Appuyez sur la touche Gel de l'image  pendant 3 secondes : une barre de progression affiche la luminosité courante.


Appuyez ensuite sur la touche changement de couleurs  pour augmenter ou appuyez sur la touche grossissement  pour diminuer la luminosité.

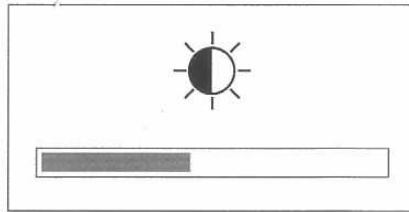

Pour quitter le réglage de la luminosité, appuyez sur la touche gel de l'image  pendant 3 secondes.

2.3.5 – Indication de batterie faible :

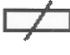
Si le niveau de batterie est faible, un symbole  clignote sur le côté en haut à droite de l'écran vous indiquant que vous devez recharger la batterie.

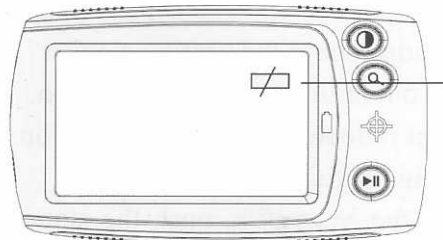

3. Ecrire avec la Loupe

Vous pouvez utiliser la loupe afin de vous aider à signer ou écrire quelques mots. Pour ce faire, dépliez au dos de la loupe le pied d'écriture (10 sur le schéma).

Ce pied élève une partie de la loupe. Placez votre stylo de biais sous la partie surélevée de la loupe afin de voir la mine de celui-ci et repérer l'endroit sur lequel vous allez écrire. Suivez votre progression sur l'écran.

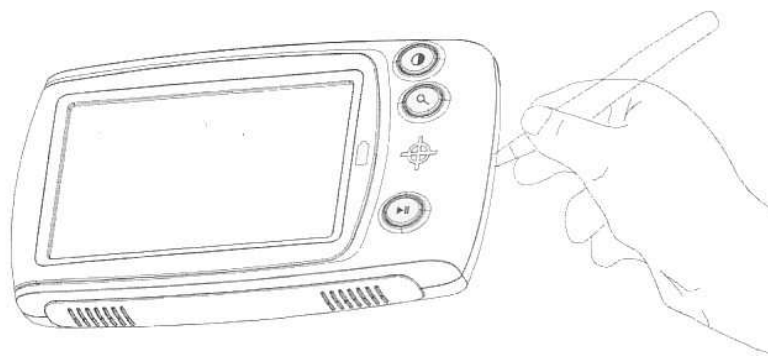

Pour utiliser le pied d'écriture, procédez comme suit :


1. Retournez l'appareil. Le pied d'écriture se situe dans une zone en retrait près de l'emplacement de la caméra.
2. Placez votre doigt dans le creux.
3. Relevez le pied et faites le pivoter jusqu'au bout sans forcer.
4. Replacez Léa sur ses pieds et ajustez le grossissement de sorte à distinguer la pointe de votre stylo ainsi que la zone d'écriture. Vous pouvez à présent écrire ou signer en regardant la pointe de votre stylo sur l'écran.
5. Lorsque vous voulez repasser à la lecture classique avec la loupe, poussez le pied de lecture dans son logement.

4. Raccordement de la Loupe à un téléviseur :

Léa vous donne la possibilité de lire un document sur votre téléviseur à la place de l'écran de la loupe en les raccordant via un câble spécifique fourni. Vous bénéficiez ainsi d'un grossissement plus important, proportionnel à votre taille d'écran.

Pour connecter votre loupe à un téléviseur, procédez comme suit :

1. Prenez le câble fourni avec Léa et reliez les différents éléments :
Ce câble dispose d'une extrémité avec une prise mâle de type Jack 3.5 mm à connecter à Léa dans l'emplacement de l'adaptateur secteur. L'autre extrémité dispose de deux prises : une RCA mâle jaune à connecter à la RCA femelle jaune du téléviseur et une prise femelle à relier à l'adaptateur secteur de Léa.

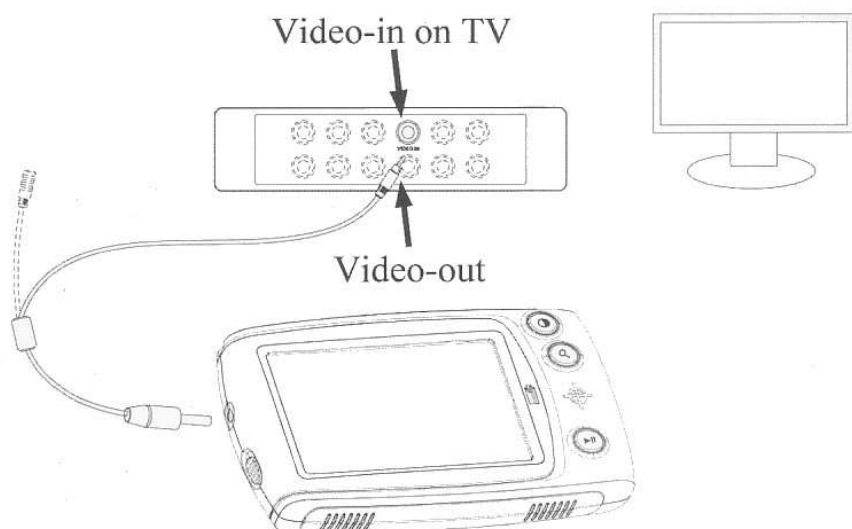

2. Une fois les branchements effectués, allumez Léa et votre téléviseur. Si nécessaire, mettez votre téléviseur sur le canal d'entrée approprié. Les éléments posés en dessous de Léa apparaissent à l'écran de votre téléviseur. Les touches de fonctions habituelles de Léa restent fonctionnelles.

5. Sécurité, maintenance et précautions :

Pour garder votre loupe en bon état, veuillez observer les directives suivantes :

1. Lisez les instructions de ce guide avant de tenter d'utiliser l'appareil.
2. Ne pas tenter de réparer la loupe ou d'ouvrir son boîtier. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et vous perdriez automatiquement le bénéfice de la garantie.
3. Gardez la loupe éloignée des zones humides et d'autres sources de liquides. Ne pas immerger l'appareil.
4. Toujours utiliser la loupe dans un endroit où la température est comprise entre 10°C et 40°C.
5. Toujours stocker la loupe dans un endroit où la température est comprise entre 20°C et 65°C.
6. Ne pas tenter de forcer le branchement d'un connecteur.

7. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la loupe pour recharger la batterie. D'autres adaptateurs peuvent endommager l'appareil.

Cet équipement a été testé par l'agence indépendante du gouvernement des Etats Unis (FCC) et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

6. Garantie :

Votre appareil est garanti 1 an.

La garantie couvre la loupe électronique Léa et la main d'œuvre liée à la réparation à l'exception de la batterie et des accessoires fournis. Dans l'éventualité d'une défaillance, veuillez contacter le Service Après-vente de l'AVH en téléphonant au 01.44.49.27.37.

Note : Les termes de la garantie peuvent changer à tout moment.

Conditions et Restrictions :

Aucun remplacement ou entretien ne sera effectué sans une copie de la facture originale ou du bon de garantie original.

Veuillez conserver vos originaux.

Si l'appareil doit être envoyé, veuillez utiliser l'emballage d'origine.

Cette garantie s'applique à tous les cas où les dommages encourus ne sont pas le résultat d'une utilisation abusive, de négligence ou d'un cas fortuit.

7. Dépannage :

Problème	Solution
L'écran est vierge.	Assurez-vous que l'appareil est allumé. Chargez la batterie. Vérifiez que l'élément que vous souhaitez agrandir est correctement positionné sous la cible de lecture.
L'appareil ne s'allume pas.	Chargez la batterie.
L'image sur l'écran est sombre et/ou déformée.	Assurez-vous que l'appareil est placé à plat sur la page que vous désirez lire.
L'indicateur de batterie LED n'est pas en rouge, même si l'adaptateur secteur relié à Léa est connecté dans une prise murale. Ou La batterie ne se recharge pas.	Vérifiez que la prise de courant est sous tension et fonctionne correctement en essayant avec un autre appareil électrique par exemple. Si la prise en question est reliée à un interrupteur mural, assurez-vous que l'interrupteur est allumé.
Il y a des traces ou des taches sur l'écran.	Nettoyez l'écran et la fenêtre de la caméra.
Le texte est trop petit pour être lu.	Appuyez sur le bouton Grossissement.
La loupe est connectée à un téléviseur, mais aucune image n'apparaît sur l'écran de télévision.	Assurez-vous que le téléviseur est allumé. Basculez vers le canal d'entrée vidéo appropriée sur votre téléviseur. Assurez-vous que le câble vidéo est correctement connecté à Léa et branché dans le port de la bonne entrée vidéo sur votre téléviseur.