

CLOVER 7S

Loupe électronique écran 7 pouces

Guide d'utilisation



Juillet 2018

Réf. 26707

Précautions



Avant d'utiliser votre Clover 7S pour la première fois, vous devez charger sa batterie.



Toujours utiliser l'appareil dans un endroit où la température est entre 10° et 35°C.



Maintenez l'appareil hors des secteurs humides, de la pluie ou autres sources d'humidité.



Ne pas essayer d'ouvrir l'appareil au risque de perdre la garantie. Contacter notre SAV.




Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni.

Démarrage


Merci d'avoir choisi la Clover 7S.

La Clover 7S vous offrira une excellente image HD aux couleurs éclatantes sur un écran LCD de 7 pouces, vous assurant la netteté de l'image en déplaçant l'appareil ou en modulant le grossissement entre 2.4X et 28X. La caméra intégrée vous propose deux modes de visualisation, de près ou de loin. La Clover 7S est la plus compacte, la plus légère et la plus simple d'utilisation dans sa catégorie.

En plus du zoom et des divers modes de couleurs d'écran, elle dispose également de fonctions telles que la ligne guide de lecture, le fenêtrage, la capture et le stockage d'images, etc...

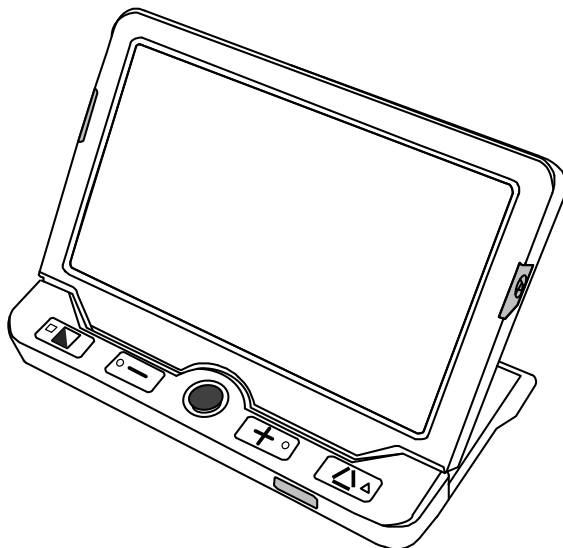


Compositions

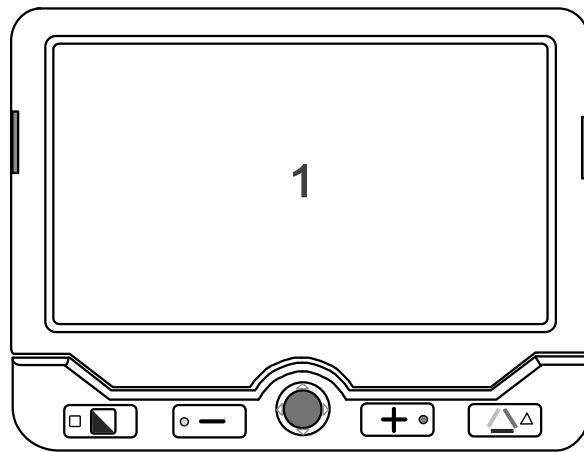


2 3 4 5 6


- 1. Ecran LCD
- 2. Choix des couleurs
- 3. Zoom -
- 4. Joystick
- 5. Zoom +
- 6. Mode couleurs réelles

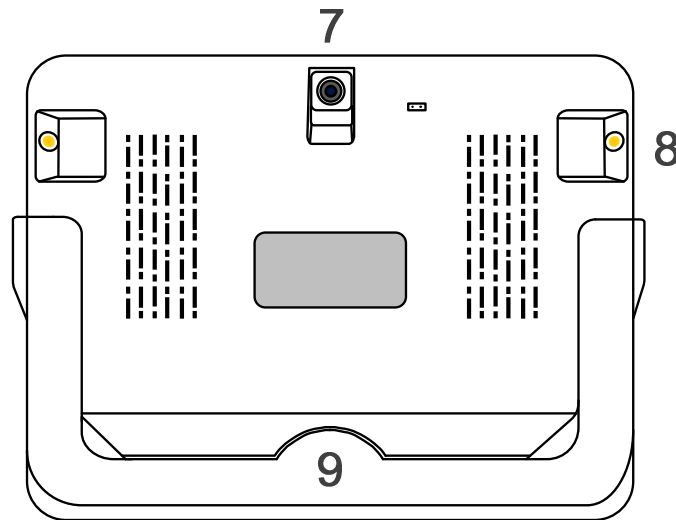


- 7. Caméra arrière
- 8. LED éclairage
- 9. Pied de lecture

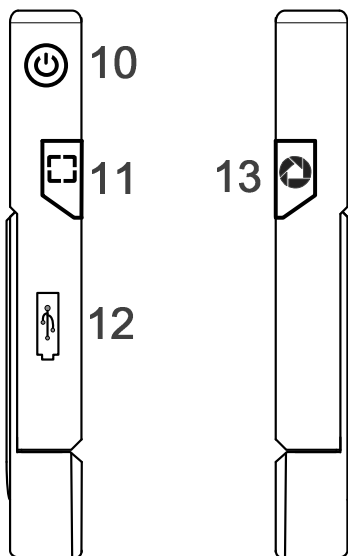

- 10. Bouton marche/arrêt
- 11. Bouton guide ligne
- 12. Port USB
- 13. Capture Image
- 14. Port HDMI
- 15. Prise adaptateur
- 16. Auto focus

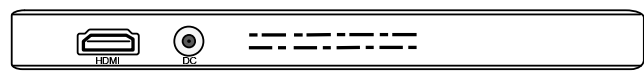

14 15

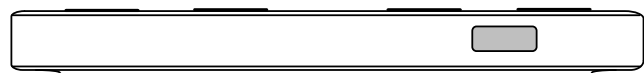


16


Accessoires




Manuel

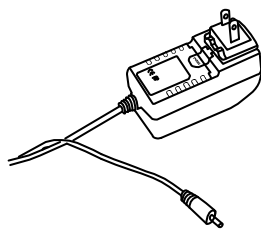


Adaptateur

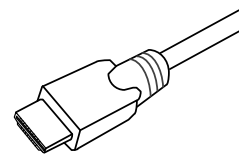

Câble HDMI

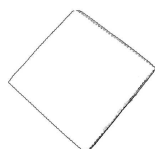


Chamoisine pour écran

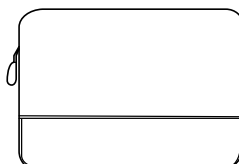

Sac de transport

Charger la batterie

1. Connectez le câble d'alimentation fourni à l'adaptateur secteur.
2. Connectez le câble d'alimentation à l'appareil.
3. Branchez l'adaptateur sur la prise secteur et commencez le chargement.

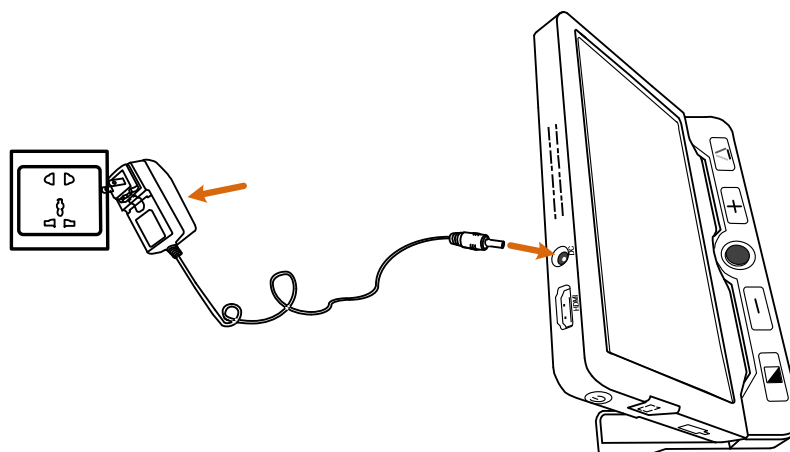


Indicateur de charge

- Quand l'unité est en charge et l'appareil éteint, un voyant vert s'allume. Il s'éteindra de lui-même dès que l'appareil sera complètement chargé. Ce qui prendra environ 4 heures, et permettra à l'appareil de fonctionner environ 3 heures.
- Quand l'unité est en charge et l'appareil allumé, le voyant restera vert.
- En utilisation sans chargement, le voyant restera vert tant que la batterie sera en charge suffisante. Il s'allumera en rouge quand la batterie sera presque déchargée. Ce sera le signal vous indiquant de recharger votre appareil.



Pied de lecture

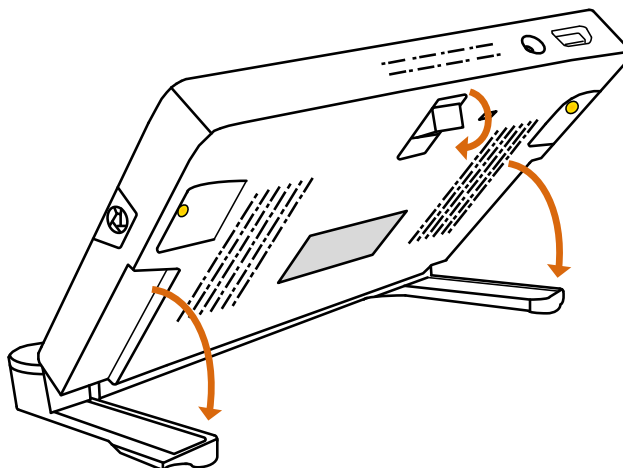Le pied de lecture pliable vous permettra une lecture plus aisée et sur une durée plus longue. Il vous offre également la possibilité d'écrire sous la caméra. Déplier simplement le pied.





Utilisation



Bouton Marche/Arrêt

- Pour allumer ou éteindre l'appareil, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes.
- Une fois l'appareil allumé, un appui court de la touche  vous donnera l'état de la batterie (charge), du mode de capture d'image, du focus et des bips.

Réglage des bips


- Appuyez simultanément sur  et  pour activer ou désactiver les bips de retour clavier.

Grossissement

- Appuyez sur le bouton Zoom  ou Zoom  pour augmenter ou réduire le grossissement.


Le grossissement se situera entre 2.4x et 28x



Mode couleur


Appuyez sur le bouton  successivement pour choisir le mode d'écran qui vous convient le mieux.

Par défaut, l'appareil vous proposera les choix suivants :



- | | |
|---|---|
|  Blanc sur fond noir |  Noir sur fond blanc |
|  Jaune sur fond noir |  Black on Yellow |

Appuyez sur le bouton  si vous souhaitez revenir au mode "couleurs réelles".


La Clover 7S vous propose de nombreux choix de couleurs supplémentaires. Pour entrer dans le mode de choix de toutes les couleurs d'écran, appuyez longuement sur . L'icône  vous indiquera que vous êtes dans ce mode « toutes couleurs ».

Une fois dans ce mode, les appuis successifs sur le bouton  vous donneront les choix suivants :



- | | |
|--|--|
|  Blanc sur noir |  Noir sur blanc |
|  Jaune sur noir |  Noir sur jaune |
|  Blanc sur bleu |  Bleu sur blanc |
|  Jaune sur bleu |  Bleu sur jaune |
|  Vert sur noir |  Noir sur vert |
|  Violet sur blanc |  Blanc sur violet |
|  Bleu sur noir |  Noir sur bleu |
|  Blanc sur vert |  Vert sur blanc |
|  Blanc sur rouge |  Rouge sur vert |

Une fois votre mode couleur choisi, une pression de 3 secondes sur le bouton  enregistrera votre choix. Une icône  apparaîtra pour confirmer votre enregistrement.


Luminosité.

- ❑ Appuyez simultanément sur les boutons  et $+$ ou $-$ pour augmenter ou réduire la luminosité.



Eclairage LED

- ❑ Appuyez simultanément sur les boutons  et  pour allumer ou éteindre l'éclairage LED.


Auto Focus

- ❑ Appuyez sur  pour enclencher ou supprimer le focus (particulièrement utile en mode écriture manuelle).





Capture d'image




- ❑ Appuyez sur  pour capturer l'image ou annuler votre capture.
- ❑ Si votre image capturée est très agrandie, vous pouvez naviguer à travers grâce au "Joystick" .

Stockage d'image



- ❑ Un appui long sur le bouton  pendant 3 secondes vous permettra de stocker l'image. Vous pouvez stocker jusqu'à 18 images.
- ❑ Note: une fois les 18 images comptabilisées, une icône apparaîtra. Il vous faudra alors supprimer des images en mode "play back" (voir plus loin).

Pour voir les images sauvegardées

- ❑ Appui long sur  pendant 3 secondes.
- ❑ Utilisez le Joystick  pour sélectionner l'image voulue. Pressez à nouveau sur  pour afficher l'image. Vous pouvez alors voir l'image choisie naviguer, l'agrandir.
- ❑ Appuyez de nouveau sur  pour revenir à la sélection d'images.


- ❑ Appuyez sur  pour supprimer l'image puis une nouvelle fois pour confirmer la suppression, ou sur tout autre bouton pour annuler.
- ❑ Un appui sur  de 2 secondes supprimera toutes les images.
- ❑ Un appui sur  de 3 secondes vous permettra de sortir du mode Playback.

Lignes et fenêtrage

- ❑ Appuyez sur  pour entrer dans le mode Lignes et Fenêtrage avec en choix successifs (tous adaptables avec le Joystick) :
 - Une ligne horizontale
 - Une ligne verticale
 - Fenêtrage horizontal
 - Fenêtrage vertical
 - Mode normal sans guide.
- ❑ Appuyez sur  pour quitter le mode lignes et fenêtres.

Sortie HDMI

Vous pouvez connecter votre Clover 7S avec un écran externe plus grand (TV, etc...) muni d'une connexion HDMI.

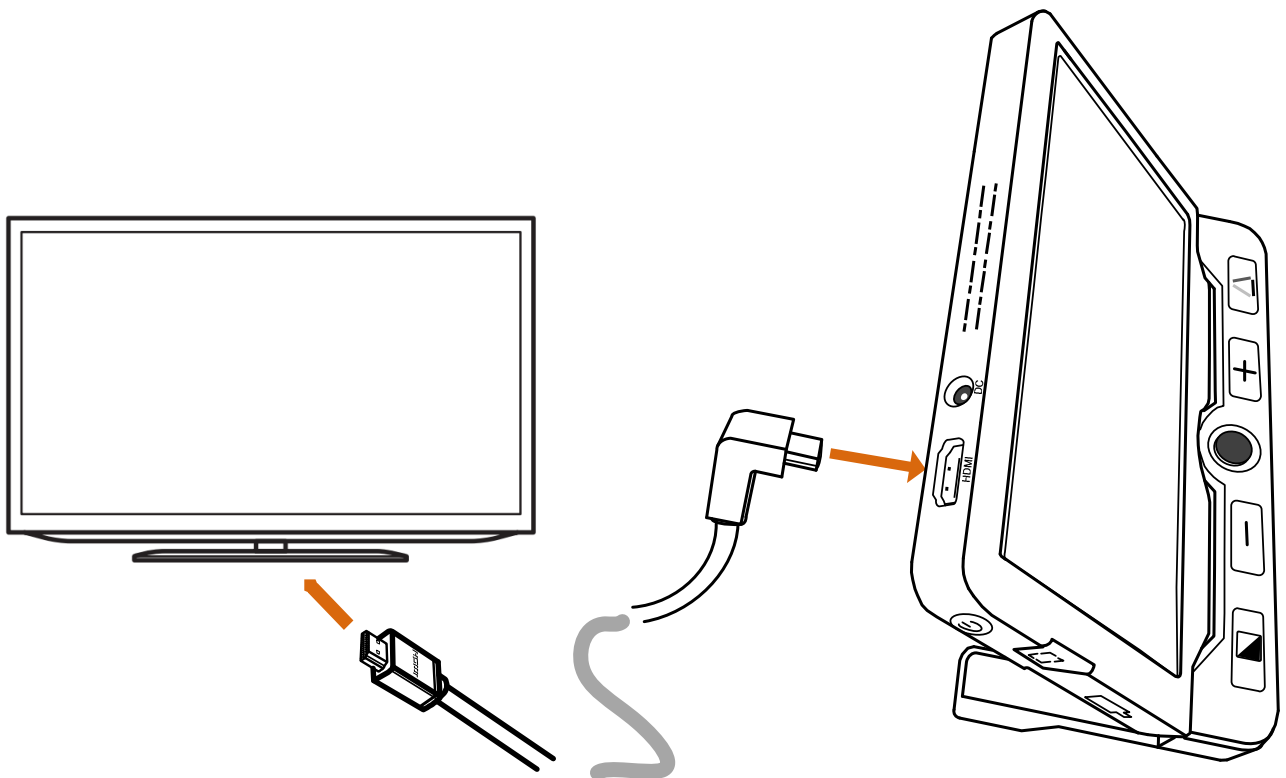



Arrêt automatique

Si votre Clover 7 n'a aucune activité pendant 3 mn, elle s'éteindra automatiquement.




Mémorisation des derniers modes choisis

L'unité mémorise automatiquement les derniers réglages choisis (agrandissement, choix de couleur, etc...)

Restaurer

Un appui simultané de 5 secondes sur  et  ramènera l'appareil dans sa configuration d'usine.

Reset (en cas de blocage)

Si l'unité semble bloquée ou ne pas fonctionner correctement, procédez à un reset par un appui simultané de 5 secondes sur les boutons   et .

En cas de problèmes


L'unité ne s'allume pas

- Branchez là au secteur.
- Chargez la batterie.
- Faites un Reset.

Ecran blanc ou écran noir

- Si votre appareil est posé sur une surface plate, l'écran peut apparaître tout blanc ou tout noir. Déplacez l'appareil pour vous assurer que l'image ne change pas.
- Réglez le grossissement.
- Réglez le mode couleur.
- Redémarrez l'appareil.
- Faites un Reset.

L'image est figée

- Si vous avez effectué une capture d'image, elle sera figée.
- Appuyez sur  une fois pour vérifier le mode en cours.
- Redémarrer l'appareil.
- Faites un Reset.

Traits ou tâches sur l'écran

- Ajustez la luminosité.
- Nettoyez l'écran et la caméra.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes, contactez notre SAV au 01 44 49 27 37.

Spécifications

- **Ecran :** 7 pouces LCD / resolution : 1280*720
- **Caméra :** 13M Pixels / vidéo resolution : 1920*1080
- **Taille :** <= 188*138*21 mm
- **Poids :** <=420 grams
- **Color Mode :** Color photo, mode favoris, 18 modes couleurs
- **Grossissement :** 2.4x – 28x
- **Batterie :** Intégrée rechargeable; 3 heures d'utilisation continue après 4 heures de chargement.
- **Adaptateur:** Entrée : 110-240V; Sortie : 5V/3A

Matériel garanti 2 ans.