

MONTRE PARLANTE FOND BLEUE

Réf. 31004



Octobre 2010

1. DESCRIPTION

Cette montre parlante à 1 bouton contient 2 mouvements indépendants :

- l'un visible sur son cadran à fond bleu et aiguilles blanches, réglable uniquement par une personne voyante,
- l'autre correspondant à l'heure annoncée par la synthèse vocale, entièrement réglable par une personne non-voyante.

L'heure affichée par les aiguilles peut donc être différente de celle annoncée par la synthèse vocale.

Le bracelet de cette montre est en cuir noir. Il possède une boucle en fer qui doit être orientée vers le haut pour bien positionner la montre à votre poignet.

Le boîtier en alu brossé de cette montre est de forme arrondie.

Elle est simple d'utilisation puisque seuls 2 boutons saillants subsistent, les autres boutons de réglage étant placés de manière discrète sur les côtés du boîtier.

Les boutons saillants :

Lorsque la boucle en fer est positionnée vers le haut, on les trouve sur le côté droit du boîtier.

- Celui du milieu sert au réglage de l'heure affichée par les aiguilles.
- Celui du haut déclenche l'annonce de l'heure par la synthèse vocale.

Les boutons discrets :

Ils sont placés en bas à gauche et en bas à droite du boîtier. Ils servent au réglage de l'heure annoncée par la synthèse vocale, et sont accessibles à l'aide d'une pointe :

- Celui situé en bas à gauche du boîtier sert au réglage des heures.
- Celui situé en bas à droite sert au réglage des minutes.

2. ALIMENTATION

Cette montre est alimentée par 2 piles fournies : une pour la synthèse vocale et l'autre pour le mouvement des aiguilles.

3. MISE EN SERVICE

Pour mettre la montre en service, il faut enlever le taquet situé sous le bouton saillant du milieu, en le tirant vers l'arrière du boîtier.

4. REGLAGES :

4.1 – Réglage de l'heure annoncée vocalement :

Munissez-vous d'une pointe afin de régler l'heure exacte de la synthèse vocale, en pressant chaque bouton discret jusqu'à obtenir l'heure souhaitée.

- Utilisez le bouton situé en bas à gauche du boîtier pour faire varier les heures.

- Pressez le bouton situé en bas à droite pour changer les minutes.

Notez bien que dans les 2 cas, les chiffres ne peuvent varier qu'en augmentant.

Ainsi, si vous dépassez l'heure souhaitée, vous devrez refaire le tour complet des chiffres pour y revenir.

4.2 – Réglage de l'heure affichée par les aiguilles :

Remarque : ce réglage ne peut être effectué que par une personne voyante.

- Tirez vers l'extérieur la molette située au milieu du côté droit du boîtier.
- Tournez-la vers l'avant ou l'arrière pour parvenir à l'heure souhaitée.
- Repoussez-la vers l'intérieur une fois l'heure souhaitée atteinte.

5. GARANTIE

Cette montre est garantie 1 an.

En cas de panne ou de changement de piles, veuillez déposer l'article au magasin ou nous le retourner à vos frais. Il doit être accompagné de son emballage d'origine, et sa facture ou son bon de garantie. Sans ces éléments la garantie n'est pas valide.

**Le bracelet ainsi que les piles ne sont pas garantis.
De même, toute détérioration due à l'humidité ainsi que l'appui trop fort sur les boutons annulent également la garantie.**