

NOTICE D'UTILISATION

MONTRE PARLANTE ET GRANDS CARACTERES DIANATALK SMALL / LARGE / ROYAL

REF. 31700 - 31705 - 31710

Version : Janvier 2024

Table des matières :

1. DESCRIPTION.....	2
1.1 – Les boutons saillants	2
1.2 – Les boutons discrets	2
2. ALIMENTATION	3
3. REGLAGES.....	3
3.1 – Comment démarrer	3
3.2 – Réglage de la langue	4
3.3 – Réglage du jour.....	4
3.4 – Réglage de l'heure annoncée vocalement.....	4
3.5 – Réglage de l'heure affichée par les aiguilles	4
3.6 – Réglage annonce de l'heure numérique ou analogique	5
4. ALIMENTATION	5

1. DESCRIPTION

Cette montre parlante à 1 bouton contient deux mouvements indépendants :

- l'un visible sur son cadran à aiguilles, réglable uniquement par une personne voyante
- l'autre correspondant à l'heure annoncée par la synthèse vocale, entièrement réglable par une personne non-voyante.

L'heure affichée par les aiguilles peut donc être différente de celle annoncée par la synthèse vocale.

Le bracelet de cette montre est en cuir de couleur noire. Il possède une boucle en fer qui doit être positionnée vers le haut pour bien mettre la montre à votre poignet.

Le boîtier acier de cette montre est de forme arrondie.

Elle est simple d'utilisation puisque seuls deux boutons saillants subsistent, les autres boutons de réglage étant placés de manière discrète sur les côtés du boîtier.

1.1 – Les boutons saillants

Lorsque la boucle en fer est positionnée vers le haut, on les trouve sur le côté droit du boîtier.

- Celui du milieu sert au réglage de l'heure affichée par les aiguilles.
- Celui du haut permet le déclenchement de l'annonce de l'heure et du jour de la semaine par la synthèse vocale.

1.2 – Les boutons discrets

Ils sont placés en haut à gauche, en bas à gauche et en bas à droite du boîtier.

Ils servent au réglage de la langue, du jour de la semaine, de l'heure annoncée par la synthèse vocale :

- Celui situé en haut à gauche du boîtier sert au réglage de la langue et du jour.
- Celui situé en bas à gauche du boîtier sert au réglage des heures.
- Celui situé en bas à droite sert au réglage des minutes.

2. ALIMENTATION

CETTE MONTRE FUNCTIONNE AVEC 1 PILE : UNE POUR LE MOUVEMENT DES AIGUILLES ET L'AUTRE POUR LA SYNTHÈSE VOCALE.

3. REGLAGES



3.1 – Comment démarrer

Appuyer sur la touche « parler », en haut à droite pendant 4 secondes jusqu'à ce qu'un signal court annonce que DianaTalks est en mode activée.

Il est également possible, lorsque vous appuyer sur ce même bouton durant 7 secondes d'activer le mode veille afin d'économiser de la batterie.

3.2 – Réglage de la langue

Langues : Allemand, Espagnol, Anglais, Italien, Français, Néerlandais, Suédois, Norvégien, Danois et Finnois.

Appuyer et maintenez la touche de réglage « **langue/jour** » en haut à gauche pendant 4 secondes, puis après annonce du jour et de l'heure, effectuez successivement un appui court avec le bouton réglage de la « **langue/jour** » afin de sélectionner parmi les 10 langues, celles qui conviennent en les faisant défiler. Verrouillez votre langue en appuyant sur la « **touche parler** » en haut à droite.

3.3 – Réglage du jour

Munissez-vous d'un outil pointu afin de régler le jour de la semaine en effectuant un appui court sur la touche de réglage « **langue/jour** » en haut à gauche.

3.4 – Réglage de l'heure annoncée vocalement

Munissez-vous d'un outil pointu afin de régler l'heure exacte de la synthèse vocale en pressant chaque bouton jusqu'à obtenir l'heure souhaitée.

- Utilisez le bouton situé en bas à gauche du boîtier pour faire varier les heures.
- Pressez le bouton situé en bas à droite pour faire varier les minutes.

Notez bien que dans les deux cas, les chiffres ne peuvent varier qu'en augmentant.

Ainsi, si vous dépassez l'heure souhaitée, vous devrez refaire le tour complet des chiffres pour y revenir.

3.5 – Réglage de l'heure affichée par les aiguilles

Ce réglage ne peut être effectué que par une personne voyante.

- Tirez vers l'extérieur la molette située au milieu du côté droit du boîtier.
- Tournez-la vers l'avant ou l'arrière pour parvenir à l'heure souhaitée.
- Repoussez-la vers l'intérieur une fois l'heure souhaitée atteinte.

3.6 – Réglage annonce de l'heure numérique ou analogique

Rapport horaire numérique = « Jeudi 14h10 »

Affichage de l'heure analogique = « 2 heures 10, jeudi, après-midi »

Dans toutes les langues à l'exception du l'allemand et le finnois, vous pouvez choisir pour annoncer l'heure la version analogique ou numérique.

4. ALIMENTATION

Cette montre est garantie 2 ans.

En cas de panne ou de changement de piles, veuillez déposer l'article au magasin ou nous le retourner à vos frais.

Il doit être accompagné de son emballage d'origine, et de sa facture ou son bon de garantie.

Sans ces éléments la garantie n'est pas valide.

Le bracelet ainsi que les piles ne sont pas garantis.

De même, toute détérioration due à l'humidité ainsi que l'appui trop fort sur les boutons annulent également la garantie.