



VisioBook HD

Mode d'emploi

Numéro d'article : 106400H07

Hardware > Révision 4.x

Mode d'emploi version : 2.1

Français 06/2017

 **Fabricant :**

BAUM Systeme GmbH
Industriestr. 15
74909 Meckesheim
Allemagne

Ventes et Support :

BAUM Retec AG
Industriestr. 15
74909 Meckesheim
Allemagne

Tél : +49 6223 4909-0
Fax : +49 6223 4909-397
Email : info@baum.de
Web : www.baum.de

BAUM Retec France SAS
3 route de d'Huilet
91150 Ormoy la Rivière
France

Tél : +33 1 85 09 09 99
Fax : +33 9 59 19 40 15
Email : contact@baum.fr
Web : www.baum.fr

BAUM Retec (Suisse) AG
Untermüli 11
6300 Zug
Suisse

Tél : +41 41 511 36 36
Fax : +41 41 511 36 39
Email : info@baum-retec.ch
Web : www.baum-retec.ch

Veillez noter que ce mode d'emploi peut contenir des erreurs, et peut-être actualisé ou modifié sans préavis.

À propos de BAUM

BAUM Retec AG est l'un des principaux fournisseurs de produits et de services destinés aux personnes aveugles et malvoyantes depuis plus de 35 ans. Les produits Braille de haute qualité et innovants, les téléagrandisseurs, les machines à lire et les solutions logicielles sont développés et fabriqués en Allemagne et sont idéaux pour une utilisation scolaire, professionnelle et privée.

Notre mission

« Nous croyons en l'indépendance de chaque aveugle ou malvoyant. Nous nous efforçons de développer des solutions permettant à chacun de trouver la clé du succès à l'école comme au travail, mais aussi d'améliorer sa qualité de vie.

Nous prenons toujours en considération les produits existants pour trouver des solutions innovatrices aux problèmes rencontrés. Notre approche comprend à la fois l'ergonomie, le design et les matériaux de la plus grande qualité. Nous nous assurons du bien-être de nos clients, et les aidons le plus possible dans leurs démarches. Le bien-être de nos employés est aussi important, nous les aidons à atteindre leurs objectifs, en assurant un environnement de travail stable et sûr.

Nous développons des solutions technologiques améliorant l'indépendance des aveugles et malvoyants. Nos produits de grande qualité agrandissent le monde des malvoyants et donnent accès au contenu électronique et imprimé aux aveugles, grâce aux synthèses vocales et aux afficheurs Brailles. »



Wolfgang Baum, Président

Contenu

1	À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI	5
2	PRESENTATION DU VISIOBOOK HD	6
3	AVANT DE COMMENCER	7
3.1	CONTENU DU CARTON	7
4	INSTALLER LE VISIOBOOK HD SUR LE BUREAU.....	8
5	POSITIONS DE LA CAMÉRA	11
6	ALIMENTATION	12
7	PANNEAU DE COMMANDES VISIOBOOK HD	13
8	LE PANNEAU DE COMMANDES – REFERENCE RAPIDE	14
9	FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE VISIOBOOK HD.....	16
9.1	ÉCLAIRAGE ON/OFF.....	19
9.2	MISE AU POINT AUTOMATIQUE	19
9.3	LES COULEURS.....	20
10	CONNEXIONS EXTERNES DU VISIOBOOK HD	21
10.1	SORTIE USB 3.0.....	21
10.2	SORTIE VIDÉO HDMI OUT.....	21
10.3	ENTRÉE VIDÉO HDMI IN.....	21
11	PROBLÈMES COURANTS ET LEURS SOLUTIONS.....	22
12	EN CAS DE PANNE	23
13	EMBALLAGE ET RETOUR ATELIER	24
14	NORMES ET CONFORMITE.....	25
14.1	CE CONFORMITÉ.....	25
14.2	FCC CONFORMITÉ	25
14.3	DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES EN ACCORD AVEC LA DIRECTIVE EC 2012/19/EU 26	
15	GARANTIE.....	28
16	SECURITÉ	29
17	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	33

1 À propos de ce mode d'emploi

Merci d'avoir choisi VisioBook HD de BAUM Retec France. Ce guide vous expliquera, étape par étape, comment utiliser le VisioBook HD.

Le VisioBook HD, produit en Allemagne, est un téléagrandisseur portable de grande qualité, qui vous assurera des années de lecture fiable. Ce guide contient tout ce que vous devez savoir concernant l'utilisation de ce nouveau produit.

Le VisioBook HD est très simple d'utilisation. En plus des instructions d'utilisation, ce guide vous donnera également des recommandations pour le positionnement de votre appareil, pour la résolution de problèmes ainsi que les règles de sécurité.

Nous vous recommandons de garder ce guide précieusement pour toute future utilisation.

Note pour les utilisateurs en Europe

Ce guide fait partie du VisioBook HD, et doit être conservé avec le VisioBook HD en toute circonstance. En cas de revente du produit, le guide doit être joint au VisioBook HD.

Copyright © 2017 BAUM Retec AG, Industriestr. 15, 74909 Meckesheim, Germany. Tous droits réservés. Toute reproduction, distribution, ou stockage dans une base de données ou une base documentaire, de tout ou partie de ce document, sous toutes les formes et quel que soit le moyen utilisé, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Baum Retec AG.

Tous les efforts ont été faits pour garantir que les informations contenues dans ce manuel sont exactes au moment de sa rédaction. Cependant, BAUM Retec AG ou ses représentants ne pourront être tenus pour responsables d'éventuelles erreurs ou omissions. De même, ils ne pourront être tenus pour responsables de dommages résultant de l'interprétation des informations du présent document

Licences et marques déposées

Toutes licences et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2 Présentation du VisioBook HD

Avec son magnifique design, qualité, puissance, légèreté et simplicité d'utilisation, le VisioBook HD est la définition même de la marque VISIO. Le VisioBook HD est le plus petit, et le plus flexible des produits de la gamme VISIO.

Le VisioBook HD peut aisément être plié, et son faible poids (3,6kg) le rend facilement transportable. De plus, la batterie vous permet de l'utiliser pendant 5 heures avant de le recharger.

Le VisioBook HD intègre une caméra Full HD, un écran Full HD de 12,5" / 32cm avec un niveau de contraste élevé, et éclairage LED. Grâce à la caméra Full HD, le VisioBook HD vous offre une image claire et nette, même pour le niveau d'agrandissement le plus bas. Ceci rend le produit très apprécié des personnes atteintes de rétinite pigmentaire et DMLA.

Tout en étant l'un des plus petits et plus légers téléagrandisseurs sur le marché, VisioBook HD fournit toutes les fonctionnalités d'un téléagrandisseur traditionnel.

VisioBook HD propose l'affichage de textes et d'images en couleurs réelles, noir sur blanc, blanc sur noir et dans une palette de fausses couleurs.

La mise au point automatique peut être désactivée pour certains besoins (écriture à la main, formulaire à remplir, manipulation de petits objets...) Grâce à son optimiseur d'image, VisioBook HD offre toujours une qualité d'image optimale, assurant une netteté du texte.

La caméra du VisioBook HD peut pivoter dans 4 positions, vous permettant d'alterner entre un texte posé sur la table, un affichage au loin, et la position miroir. L'écran est ajustable en hauteur et inclinaison.

Le VisioBook HD peut également lire des documents de mauvaise qualité (texte délavé, papiers froissés ou sales) et leur donner netteté et contraste.

Cependant, malgré tous nos efforts, certains documents ne pourront être affichés correctement, nous vous conseillons, dans ce cas, d'utiliser le mode « couleurs réelles ».

3 Avant de commencer

Lisez attentivement les instructions de sécurité à la fin de ce guide, et vérifiez le contenu de l'emballage

3.1 Contenu du carton

- 1 téléagrandisseur VisioBook HD
- 1 Housse de protection
- 1 Bloc d'alimentation avec câble
- 1 Mode d'emploi
- 1 Tissu de nettoyage pour caméra et écran



4 Installer le VisioBook HD sur le bureau



Posez le VisioBook HD sur le bureau avec le bloc caméra à environ 20cm du bord avant de la table.



Maintenez le plateau du dessous avec une main et soulevez par les pattes extérieures du bloc caméra.



Dépliez jusqu'au clic indiquant sa position finale.

Attention: Ne touchez pas la caméra !



Maintenant, dépliez l'écran en soulevant des deux côtés simultanément.



Tirez doucement l'écran vers vous...



...en le levant légèrement vers le haut.



Ajustez l'écran à la position qui vous convient.




Tournez le bloc caméra vers le bas jusqu'au clic indiquant la position de lecture

En cas de besoin, vous pouvez ranger le VisioBook HD en procédant dans l'ordre inverse. Tournez la caméra dans la position de repos avant de le replier. Les quatre pieds en caoutchouc se trouvant près de la caméra se poseront sur la table de lecture une fois l'appareil replié. Le VisioBook HD s'éteint automatiquement lorsqu'il est plié.

5 Positions de la caméra

VisioBook HD peut être utilisé dans quatre positions différentes. L'objectif s'ajustera automatiquement selon la position de la caméra choisie.

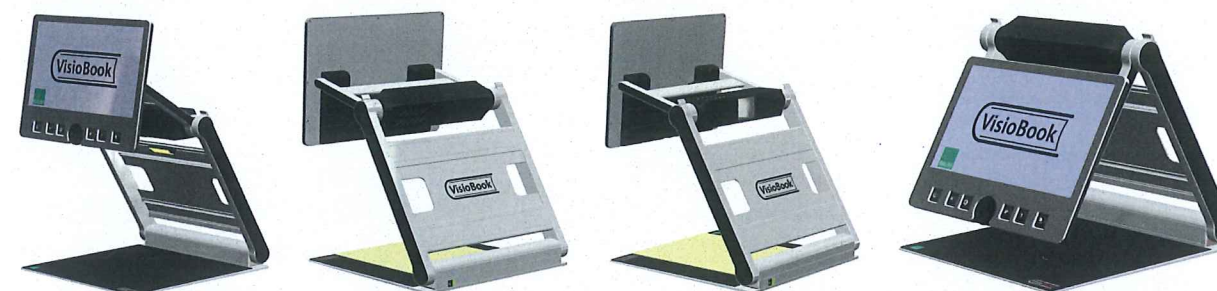

- Vers le bas, en direction du plateau inférieur. Utilisation pour la manipulation d'objets de petite taille.
- Vers le bas, légèrement incliné vers l'avant pour utilisation en mode lecture (la distorsion éventuelle sera automatiquement corrigée). En déplaçant votre feuille, vous pouvez lire une page A4 entière.
- Position pour voir à distance, l'objectif est orienté vers l'arrière de l'appareil pour permettre la lecture, visionnage de tableaux etc.
- Position miroir. Tirez l'écran vers le bas et pivotez la caméra vers vous, vous voyez votre visage à l'écran.

Votre VisioBook HD est maintenant prêt à être utilisé, sur batterie ou sur secteur.

6 Alimentation


Pour une utilisation prolongée, ou si vous souhaitez charger la batterie, branchez le câble d'alimentation sur secteur et sur la prise prévue à cet effet à l'arrière du VisioBook HD.

Le voyant de contrôle à l'arrière devient orange pendant la charge de la batterie et ensuite vert lorsque la batterie est complètement chargée.




Vous pourrez vous servir librement du VisioBook HD pendant la recharge de la batterie, et même laisser l'appareil branché après la recharge.


Correctement chargé, le VisioBook HD fonctionnera sur batterie pendant environ 5 heures.

Le niveau de la batterie se visualise sur le côté droit de l'écran avec un symbole de pile lorsque le VisioBook HD est allumé ou alors en appuyant sur la touche ON/OFF . Pendant la recharge, le symbole est traversé par un éclair.

7 Panneau de commandes VisioBook HD

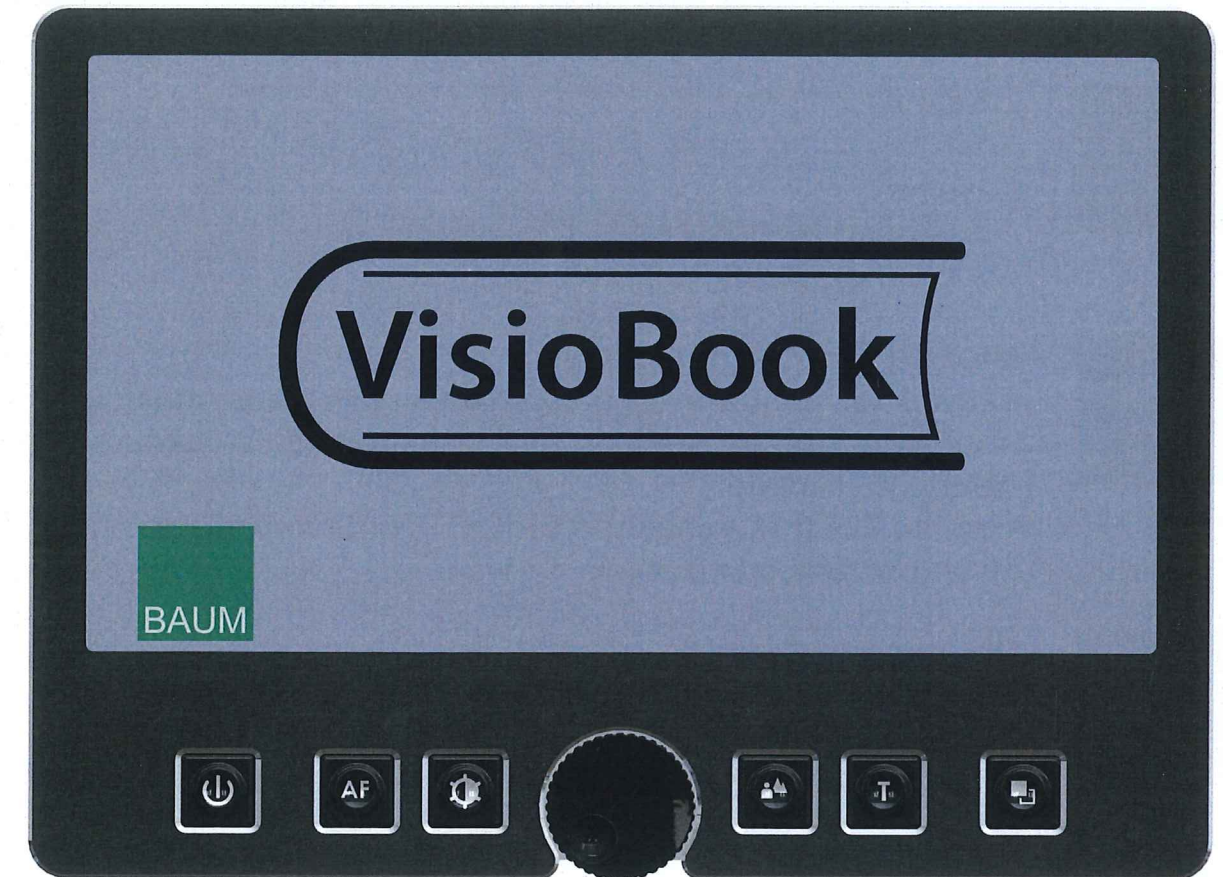


8 Le Panneau de Commandes – référence rapide

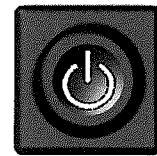

ON/OFF

Appui court à appareil éteint Allume l'appareil (la lumière s'allume).

Appui court à appareil allumé : indique le niveau de batterie
Appui long : éteint l'appareil

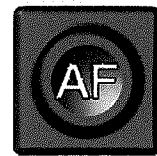


Mise au Point Automatique

Activation/Désactivation de la mise au point automatique

Mise au Point Automatique AF ON : vous aurez toujours une netteté de l'image


Mise au Point Automatique AF OFF : pour la prise de notes ou la manipulation d'objets

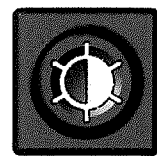

Optimiseur d'image

Sélectionnez l'un des 5 réglages contraste/luminosité pour visualiser correctement des documents de faible qualité.

Appuyez longuement pour allumer ou éteindre la lumière.

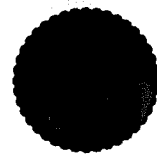


Zoom

Tournez à gauche pour diminuer l'agrandissement, à droite pour l'augmenter.



Image

Utilisez cette option pour visualiser les photos ou les documents en couleurs réelles. Utile également pour des documents de qualité médiocre. Permet également de basculer entre l'image de la caméra et l'image d'un ordinateur (appareil connecté).

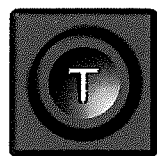


Texte

Modalité pour la lecture et pour l'écriture.

Utiliser cette touche pour basculer en contraste élevé.

Appuyez une deuxième fois pour inverser les couleurs.

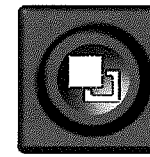

Fausses Couleurs

En mode texte : permet de choisir entre 7 fausses couleurs. (Utilisez le bouton Texte pour inverser les couleurs)


En mode image : Ajustement de la balance des blancs : blanc chaud rougeoyant, blanc neutre et blanc froid bleuisant.


9 Familiarisez-vous avec votre VisioBook HD

Vous avez maintenant installé le VisioBook HD correctement sur votre bureau, et il est branché sur une prise secteur.

Vous savez incliner l'écran de lecture dans une position confortable.

Maintenant, allumez le VisioBook HD pour votre première utilisation.

Le panneau de commandes est situé juste sous l'écran, et le bouton d'allumage est celui situé le plus à gauche. Un appui court sur ce bouton allume le VisioBook HD. Dès que les lumières s'allument, vous pouvez relâcher le bouton. L'écran affiche pendant quelques secondes un écran d'accueil avec la version du VisioBook HD, puis une image agrandie. Le niveau de batterie est visible pendant quelques secondes sur le côté droit de l'écran. Vous pouvez à tout moment vérifier le niveau de la batterie en appuyant brièvement sur la touche **on/off** 

Vous pouvez éteindre le VisioBook HD en maintenant la touche ON/OFF  enfoncé pendant plus d'une seconde. Ainsi, touchant ce bouton par inadvertance n'aura pas d'incidence, vous pouvez même allumer et éteindre plusieurs fois pour vous habituer à son fonctionnement.



Placer un document sur le plateau. Choisissez de préférence un document coloré, comme un magazine, contenant à la fois image et texte.

Vous pouvez aligner le document horizontalement en le calant contre le bord argenté à l'arrière de la table de lecture.

Essayons à présent les touches du panneau de commandes. Comme nous l'avons déjà vu, le bouton d'allumage est celui situé le plus à gauche.

Au milieu du panneau de commandes, vous trouvez le bouton **Zoom**, un bouton rond qui sert à régler le niveau d'agrandissement. En tournant ce bouton vers la droite, vous augmentez le niveau d'agrandissement, et lorsque vous le tournez vers la gauche, vous diminuerez le niveau d'agrandissement.

Le niveau d'agrandissement minimal ne convient pas pour la lecture, mais permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la structure du document. Ainsi vous pouvez facilement trouver la position souhaitée pour l'agrandissement.

Ce mode peut faire apparaître les coins du document flous, ceci est dû à l'objectif. Cet effet peut être diminué en passant en fausses couleurs.

Appuyez maintenant sur le bouton **Image**, situé à droite bouton **Zoom**. La pression sur le bouton Image règle le VisioBook HD en mode image ou couleurs réels. Ce mode est idéal pour l'affichage des images, ainsi que des textes de mauvaise qualité. Ce mode affiche les couleurs naturelles dans toutes les nuances.

Déplacez le document jusqu'à ce qu'une image du document soit visible. Si l'image est trop petite, augmentez le niveau d'agrandissement en tournant le bouton **Zoom**. Si vous êtes perdu et n'arrivez plus à vous repérer sur la page, diminuez le zoom, repositionnez la feuille correctement, et augmentez à nouveau le zoom.

VisioBook HD garde en mémoire le dernier mode utilisé, même après l'avoir éteint.

Vous connaissez bien le VisioBook HD à présent, nous pouvons passer à la lecture d'un texte.

Déplacez le document afin d'afficher du texte à l'écran. Appuyez sur le bouton **Texte**. Il est situé à droite du bouton **Image**, c'est donc le second bouton à droite du bouton **Zoom**. L'image est alors affichée avec un contraste élevé, en deux couleurs uniquement. En appuyant encore une fois sur le bouton **Texte**, les couleurs du fond et des caractères sont inversées. Essayez d'appuyer plusieurs fois sur ce bouton pour vous rendre compte des différences, et essayez même le mode image pour visualiser les différences.

En mode texte, les lettres sont plus contrastées, donc plus lisibles, alors qu'en mode image, les couleurs et les niveaux de gris sont fidèlement reproduits.

Les couleurs du mode texte ne vous conviennent pas ? Pas de problème ! Modifions-les ! Vous avez le choix entre 7 jeux de couleurs, et, avec la possibilité d'inverser couleurs de fond et de caractères, cela vous offre 14 combinaisons possibles. Testez-les en appuyant sur le bouton **Fausses Couleurs**, il s'agit du bouton le plus à droite sur le panneau de commandes. À chaque appui, les couleurs changent ; une fois les 7 options parcourues, on revient à la première ; pour inverser couleurs de fond et de caractères, appuyez sur la touche **Texte**.

Les couleurs artificielles disponibles sont noir/blanc, noir/jaune, noir/cyan, noir/vert, noir/magenta, bleu/blanc et bleu/jaune.

Choisissez la palette de couleurs qui vous convient le mieux en appuyant sur le bouton **Fausses Couleurs**, puis inversez couleur de fond et couleur des caractères en appuyant sur la touche **Texte**. Faites plusieurs essais pour trouver la combinaison la mieux adaptée à votre vue.

En mode Image, le bouton **Fausses Couleurs** a une autre fonction : il permet d'ajuster la balance des blancs. Appuyez successivement pour passer d'une dominante rouge mieux appropriée aux photos, à la couleur neutre, puis à la dominante bleue plus appropriée à la visualisation de textes colorés.

NB: Les paramètres de couleurs que vous avez choisis sont mémorisés. Ainsi, lorsque vous passez du mode Texte au mode Image, puis revenez au mode Texte, vous retrouvez vos couleurs préférées. Le dernier jeu de couleurs utilisé sera ainsi mémorisé, même après avoir éteint le VisioBook HD.

Maintenant que vous avez trouvé votre jeu de couleurs préféré en mode Texte, essayons de lire un document plus difficile, avec un contraste faible ou une mauvaise qualité d'impression. Dans la plupart des cas, l'optimiseur d'image automatique de VisioBook HD affiche déjà une image agrandie de bonne qualité. Ceci est valable pour de documents avec caractères noirs sur papier blanc. Cependant, on rencontre des documents plus difficiles à lire, lorsque les caractères sont imprimés en couleur sur un fond de couleur, photocopies de mauvaise qualité, ou sur du papier jauni. Dans ces cas, vous utiliserez le bouton **Optimiseur d'Image**. C'est le troisième en partant de la gauche, le plus près du bouton de **Zoom**. Il permet de choisir entre 5 niveaux différents de

contraste/luminosité. Si le résultat affiché à l'écran n'est pas satisfaisant, appuyez plusieurs fois sur la touche, afin d'obtenir le meilleur résultat.

Vous pouvez utiliser ce procédé en mode Texte ET en mode Image.

NB: Appuyer quatre fois sur ce bouton afin de revenir au réglage initial.

9.1 Éclairage ON/OFF

Lors de la lecture d'un papier glacé ou d'un écran rétro-éclairé tels que des téléphones mobiles ou tablettes, vous devez éteindre l'éclairage du VisioBook HD par un long appui sur le bouton **Optimiseur d'Image**. Vous évitez ainsi des reflets lumineux sur l'écran. Un nouvel appui long rallumera l'éclairage.

9.2 Mise au point automatique

Il ne nous reste plus qu'un bouton à découvrir, le bouton **Mise au Point Automatique**. Cela semble compliqué, mais est très simple d'utilisation.

Lors de l'allumage de VisioBook HD, l'appareil est en mode **Mise au Point Automatique** par défaut. Ainsi la mise au point est faite automatiquement, que le document soit mince ou épais. VisioBook HD fait toujours la mise au point sur la partie agrandie, et vous aurez ainsi toujours une image nette et claire. Ce réglage sera utilisé dans la plupart des cas.

Cependant, pour remplir un formulaire, une grille de mots croisés, vous vernir les ongles ou regarder un objet en trois dimensions, il sera plus intéressant de passer en **Mise au Point Manuelle**.

Commençons par localiser le bouton. Le bouton **Mise au Point Automatique** est le deuxième en partant de la gauche. Appuyez pour activer ou désactiver la Mise au Point Automatique. Sur l'écran, l'indication **AF ON** ou **AF OFF** sera visible pendant quelques secondes.

Expérimentons cette fonction. Si vous l'avez déjà modifiée, appuyez sur le bouton pour afficher la mention « **AF ON** » et activer ainsi la **Mise au Point Automatique**. VisioBook HD vous montre une image agrandie et très nette du document posé sur le plateau de lecture. Posez votre main sur le document. VisioBook HD va agrandir l'image de votre main, vous

voyez votre peau très nettement, alors que les caractères imprimés apparaîtront flous. Ce phénomène se produira de la même manière si vous remplissez un formulaire. Plutôt que d'afficher les caractères, la mise au point se fera sur votre main, et lorsque vous retirez la main, les caractères seront à nouveau affichés nettement.

Essayons donc en passant en mode **Mise au Point Manuelle**. Placez un formulaire sur la table de lecture. Si VisioBook HD n'affiche pas les caractères de façon nette, appuyez sur la touche **Mise au Pont Automatique**, « **AF ON** » doit apparaître sur l'écran. Lorsque l'image des caractères est bien nette, appuyez à nouveau sur la touche, pour désactiver la **Mise au Point Automatique**, « **AF OFF** » doit s'afficher. Posez votre main sur le formulaire, et vous pouvez constater que la mise au point reste sur la feuille de papier. Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de réactiver la **Mise au Point Automatique** en appuyant sur le bouton **Mise au Pont Automatique** et vérifier que « **AF ON** » apparaît bien sur l'écran.

9.3 Les Couleurs

Palettes de couleurs artificielles

Le VisioBook HD est équipé de deux palettes de 7 combinaisons de fausses couleurs.

La palette de couleurs standards affiche des couleurs très vives et intenses. Ces couleurs conviennent à la plupart des utilisateurs. Les couleurs artificielles standards sont : noir/blanc ; noir/jaune ; noir/cyan ; noir/vert ; noir/magenta ; bleu/blanc et bleu/jaune.

Pour certaines personnes, très sensibles à la lumière, il existe une deuxième palette de couleurs moins vives. Ces couleurs sont : noir/blanc, noir/ivoire, noir/jaune pâle, noir/pêche pâle, noir/rose pâle, bleu/ivoire, bleu/blanc

Pour basculer entre les deux palettes, appuyez simultanément sur les boutons Image, Texte et le bouton Power. VisioBook HD mémorise ce réglage pour votre prochaine utilisation.

10 Connexions externes du VisioBook HD

A l'arrière du VisioBook HD vous trouverez trois prises périphériques. Une sortie USB3.0, une entrée vidéo et une sortie vidéo (HDMI).



10.1 Sortie USB 3.0

La prise Micro USB3.0 servira à connecter un ordinateur au VisioBook HD, qui sera reconnu comme une caméra externe par Windows XP, VISTA, Windows 7,8 et 10 ainsi que par les MAC.

Le signal vidéo offre des images en Full HD, format 1920 x 1080 pixels, fréquence de rafraîchissement d'image de 60 Hz par seconde.

Si votre ordinateur n'a pas de Micro USB3.0, vous pouvez également connecter un Micro USB2.

Utilisez un programme standard tel qu'AMCap ou VLC Player pour Windows pour visualiser les images provenant de votre VisioBook HD. Vous pouvez également sauvegarder images et vidéos. Le VisioBook HD ne fournit pas de logiciel spécial pour les vidéos.

10.2 Sortie Vidéo HDMI OUT

La prise HDMI OUT fournit un signal DVI-D avec une résolution de 1920x1080 pixels, 60 Hz par seconde. Vous pouvez connecter tout écran HDMI ou DVI-D avec un adaptateur. L'image sera affichée sur les deux écrans.

10.3 Entrée Vidéo HDMI IN

La prise HDMI IN vous sert à connecter un ordinateur ou autre source vidéo avec un signal DVI-D de 1920 x 1080 pixels, fréquence de 60Hz. Appuyez sur le bouton **Image** pour basculer entre l'image caméra et la source externe.

Maintenant vous savez tout sur votre VisioBook HD. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

11 Problèmes courants et leurs solutions

Votre VisioBook HD ne fonctionne pas correctement et vous ne trouvez pas la solution.

Souvent une petite panne peut causer un grand problème. Lisez attentivement ce qui suit afin de trouver la solution par vous-même. Si vous ne trouvez pas la solution éteignez le VisioBook HD, débranchez la prise électrique et contactez votre revendeur.

L'écran et les lumières ne s'allument pas

Eteignez, puis rallumez votre VisioBook HD. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché, et que la prise électrique fonctionne correctement.

Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.

L'image est floue

Vérifiez que la feuille plastique qui protège l'objectif de la caméra a bien été retirée. Tournez le bouton du zoom jusqu'à la position centrale.

Appuyez sur le bouton Mise au point Automatique, la mention « AF ON », doit apparaître ; dans le cas contraire, appuyez à nouveau sur le même bouton.

Le document ne peut être lu

Tournez le bouton Zoom vers la droite. Essayez les différents réglages du bouton Optimiseur d'Image.

Les lettres semblent bouger

Augmentez le niveau d'agrandissement en tournant le bouton Zoom dans le sens des aiguilles d'une montre.

12 En cas de panne

Que faire si le VisioDesk ne fonctionne plus correctement :

- Avez-vous vérifié les branchements et les connexions conformément au manuel ?
- Avez-vous bien retiré le film de protection de la lentille de la caméra ? Est-ce que la prise de courant à laquelle le Visio 500 est connecté fonctionne correctement ?

Si votre VisioDesk ne fonctionne plus, débranchez-le du secteur, ne l'utilisez plus, et contactez votre distributeur ou BAUM Retec.

Pour contacter BAUM Retec, consultez les informations ci-dessous. Contactez BAUM Retec France pour tout VisioDesk acheté ou vendu en France. Dans les autres cas, contactez BAUM RETEC AG en Allemagne.

Nous commencerons par vous aider à diagnostiquer le problème. S'il s'avère qu'une réparation est nécessaire, vous devrez emballer l'appareil dans son carton d'origine. Si une personne vous assiste dans cette démarche, montrez-lui ce manuel afin qu'elle suive les instructions pour replier et emballer l'appareil correctement.

Informations de contact :

FRANCE

BAUM Retec France
3 route de d'Huilet
91150 Ormoy la Rivière
France

Tél : +33 1 85 09 09 99
Fax : +33 9 59 19 40 15
Email : a.mercier@baum.fr
Web : www.baum.fr

World Headquarters

BAUM Retec AG - Service,
Industriestr. 15
74909 Meckesheim
Germany

Tel: +49 6223 4909-0
Email: service@baum.de
Web : www.baum.de

13 Emballage et retour atelier

Pour renvoyer le VisioBook HD dans l'emballage de réexpédition, procédez comme suit :

- Eteignez le VisioBook HD
- Débranchez la prise de courant
- Repliez Le VisioBook HD comme pour le ranger.
- Retirez le carton ondulé du carton.
- Entourez chaque côté de l'appareil de carton ondulé, et remettez l'appareil dans le carton.
- Posez par-dessus le couvercle en carton ondulé, et rangez le câble d'alimentation dans le sachet prévu à cet effet.
- Fermez le carton.

14 Normes et conformité

14.1 CE conformité

This product conforms to the guidelines of the European Union and takes the CE- and ROHS Marking.



RoHS

14.2 FCC conformité

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference's that may cause undesirable operation
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

14.3 Dispositions environnementales en accord avec la directive EC 2012/19/EU



Le symbole représentant « une poubelle barrée d'une croix » apposé sur l'appareil, atteste que l'appareil, ainsi que les accessoires, ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères ordinaires. Il est important de les recycler en suivant les procédures relatives au respect de l'environnement.

Cet appareil contient des composants électriques. Afin d'éviter des risques ou des dangers pour l'environnement en cas de non-respect des règles professionnelles de recyclage, cet appareil et ses accessoires doivent être traités conformément aux directives EC ou aux règles locales en vigueur. Vérifiez les procédures pour le recyclage de ce type d'appareils auprès des instances locales, ou interrogez votre distributeur.

Pour des raisons de protection de la vie privée, assurez-vous de supprimer toutes les données personnelles de l'appareil avant de vous en débarrasser.

Products and services for
the blind and visually impaired



Declaration of Conformity



We, **BAUM Systeme GmbH**
Industriestraße 15
74909 Meckesheim
Germany
info@baum.de
+49-6223-4909-0

declare in our sole responsibility, that our portable video magnifier system named

VisioBook (Rev.5)

complies with the essential requirements of

2014/35/EC	Low Voltage Directive
2014/30/EC	EMC Directive
2011/65/EC	RoHS Directive

and conforms to the following normative documents

Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013
EMC	EN 55022:2010/AC:2011
	EN 55024:2010+A1:2015

Meckesheim, 4/5/2017


Thomas Friehoff, CTO

Document: CE-VarioBook-2017-04-05.docx

15 Garantie

BAUM Retec AG garantit que votre VisioBook HD, à la date de livraison, est exempt de défauts matériels et de main d'œuvre. La garantie ne peut être transmise, et ne s'applique pas aux groupes, utilisateurs multiples ou sociétés. Cet appareil a été conçu pour une utilisation par des particuliers, dans le cadre domestique ou dans un bureau. BAUM Retec AG se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'appareil par un appareil équivalent ou de qualité supérieure. BAUM Retec AG ou ses distributeurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables de dommages indirects. Les recours pour l'utilisateur se limitent au remplacement des pièces et des différents modules de l'appareil. Cette garantie ne s'applique que si les réparations sont effectuées dans le pays d'achat de l'appareil, sur présentation de l'original du bon de garantie. Pour une extension de garantie, pendant ou après la période de garantie légale, contactez votre distributeur. BAUM Retec AG décline toute responsabilité si l'appareil est utilisé pour d'autres usages que ceux décrits dans ce manuel.

VisioBook HD est livré avec une garantie de 2 ans et une garantie limitée à 6 mois sur la batterie et les accessoires.

Les défauts causés par une utilisation non conforme à ce guide ne sont pas couverts par la garantie.

16 Sécurité

Important : Le non-respect des mises en garde et consignes de sécurité pourra annuler la garantie du constructeur, peut endommager l'appareil et causer des blessures graves.

Vérifiez soigneusement le contenu du carton avant d'utiliser l'appareil. Si vous constatez des anomalies ou des pièces manquantes, contactez immédiatement votre distributeur.

Conservez l'emballage d'origine, afin de pouvoir renvoyer l'appareil dans de bonnes conditions. Un retour sans emballage approprié pourra entraîner l'annulation de la garantie.

En cas de perte du carton d'origine, votre revendeur vous fournira un nouveau sur simple demande.

Lisez attentivement le guide de l'utilisateur, ainsi que les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil.

Cet appareil doit être utilisé uniquement dans un cadre domestique ou dans un bureau.

Ne posez jamais le VisioBook HD sur une surface instable. L'appareil risquerait de tomber et de provoquer de graves blessures, l'appareil pourrait en outre être sérieusement endommagé. Respectez les consignes d'installation afin d'éviter les risques de chute. Gardez de l'espace autour de l'appareil pour éviter de l'accrocher.

VisioBook HD comporte des parties mobiles. Prenez garde en le manipulant. Vous risquez de vous blesser si un vêtement, ou vos doigts, se coincent dans les mécanismes. N'hésitez pas à demander conseil à votre distributeur si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation.

Utilisez toujours une prise de courant avec terre.

N'utilisez jamais l'appareil si vous constatez une détérioration sur l'appareil ou sur les câbles.

Si vous constatez une anomalie dans le fonctionnement ou sur le matériel, contactez immédiatement votre revendeur BAUM.

Si vous sentez une odeur de brûlé, ou toute odeur suspecte venant de l'appareil, débranchez-le immédiatement.

N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Ceci pourrait vous blesser et endommager l'appareil.

Ne laissez pas du sable ou de la poussière entrer en contact avec l'appareil, ils risqueraient de provoquer des dommages sérieux, voire de rendre une réparation impossible.

Veillez à avoir les mains propres lorsque vous utilisez l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil dans des zones émettant des ondes radio ou radiations.

Gardez une distance d'au moins 30cm avec les téléphones portables.

N'utilisez que les accessoires d'origine. L'utilisation d'autres accessoires peut entraîner des problèmes de fonctionnement et de sécurité.

N'utilisez pas une alimentation qui ne serait pas conçue pour cet appareil. N'utilisez que l'alimentation d'origine !

N'utilisez pas le câble d'alimentation pour d'autres appareils.

Évitez la présence de liquides et de nourriture à proximité de l'appareil.

Pour éviter un risque de dommages, n'entreposez pas, ni n'utilisez l'appareil dans les endroits suivants :

- Dans une voiture, vitres fermées en plein soleil.
- En plein soleil, ou trop près d'une source de chaleur, radiateur, etc.
- Dans un environnement soumis à de fortes vibrations, comme le dessus d'une machine à laver.

- Dans un environnement soumis à de fortes ondes magnétiques, comme à proximité de haut-parleurs.
- Dans des endroits humides (salles de bain), dans l'eau ou près de l'eau.
- Sous la pluie ou la neige.
- Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C.
- Le taux d'humidité ambiante doit être compris entre 20 % et 80 %.
- Évitez les changements brutaux de température.

Si vous déplacez l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourrait apparaître. Attendez que l'appareil sèche et soit revenu à la température ambiante avant de l'utiliser.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Retirez la poussière et les saletés à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent neutre, puis essuyez-le. N'appliquez pas d'eau directement sur l'appareil.

N'insérez pas d'objets dans l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil en temps d'orage, débranchez-le du secteur pendant les orages. L'utilisation d'une prise avec protection contre les surtensions est recommandée, vous pouvez vous en procurer dans tous les magasins de bricolage. Notez cependant que ceci ne garantit pas une protection à 100 % contre les surtensions.

Ne branchez et ne débranchez pas l'appareil les mains mouillées.

Ne mettez pas l'appareil dans un four micro-ondes, ni dans aucun autre appareil électroménager.

Ne démontez pas l'appareil, ni ne tentez de le réparer ou de le modifier par vous-même.

Si un liquide, ou des fragments métalliques se glissent dans l'appareil, éteignez-le immédiatement et débranchez-le.

Ne tirez pas sur le fil pour débrancher la prise.

Évitez les chocs sur l'appareil, ne le lancez pas, ne le faites pas tomber.

Seul BAUM Retec ou des techniciens agréés par BAUM Retec sont habilités à effectuer les réparations.

Entretien et maintenance

Évitez l'humidité et l'eau.

Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de produit d'entretien ni détergent.

Si l'appareil a été exposé à des températures très basses ou au gel, il ne pourra pas fonctionner et devra être ramené, doucement, à la température de la pièce. N'utilisez jamais un appareil de cuisson (four traditionnel, micro-ondes) ou radiateur pour le réchauffer.

Évitez d'endommager l'appareil et accessoires.

N'utilisez que l'alimentation fournie dans le carton.

17 Caractéristiques techniques

- Vidéo-agrandisseur HD pliable
- 4 positions de Caméra : vers le plateau, pivoté vers l'arrière avec correction de la distorsion, vers l'avant et position miroir.
- Mode couleurs
- Deux palettes de 7 fausses couleurs ainsi que leurs contraste inversé (14 combinaisons de chaque palette).
- Palette standard: (noir/blanc, noir/jaune, noir/cyan, noir/vert, noir/magenta, bleu/blanc et bleu/jaune).
- Palette alternative: noir/blanc, noir/ivoire, noir/jaune pâle, noir/pêche pâle, noir/rose pâle, bleu/ivoire, bleu/blanc.
- Écran 12,5" (32 cm) HD avec éclairage LED, écran large de 16:9, 1920/1080 pixels, 60Hz.
- Mise au point automatique
- Mise au point manuelle pour écriture à la main.
- Exposition automatique
- Zoom de 1,8 à 30 fois
- Distance de la Camera à la base 270mm
- Connexions externes :
- Sortie USB (Micro USB3.0-B) (pour caméra standard),
- Entrée vidéo pour source vidéo externe pour PC ou MAC sur prise HDMI (Résolution 1920 x 1080 pixels, 60Hz),
- Sortie vidéo DVI-D sur prise HDMI (Résolution 1920 x 1080 pixels/ 60Hz)
- Poids : Très léger, env. 3,6 kg
- Dimensions : Déplié : 400 mm x 310 mm x 480 mm
Plié : 340 mm x 310 mm x 54 mm
- Alimentation 100-240VAC 50/60HzAC-Adaptateur 19V/60W
- Batterie Rechargeable: 64,8Wh, autonomie : 5h
- Consommation d'énergie (en opération) : <15W, en veille : <1W