

Notice

Juillet 2022

TSL MOBIL 16 Full HD

Thomas Sinclair Laboratoires

Télé-agrandisseur avec écran 16" (40 cm)



1 Préambule

Félicitations pour l'acquisition du télé-agrandisseur THOMAS SINCLAIR MOBIL 16 Full HD fabriqué par Thomas Sinclair Laboratoires.

Prenez le temps de lire cette notice . Elle vous permettra de mieux utiliser l'appareil et d'obtenir un résultat optimal en terme de grossissement et de confort visuel.

2 Sécurité et Entretien

Pour garantir la sécurité, merci de respecter les règles suivantes :

Après ouverture de la boîte, merci d'en vérifier le contenu. S'il est endommagé, ou s'il manque des pièces, prenez contact avec le distributeur.

Ne pas intervenir sur l'appareil vous même ! Pour les réparations, contacter le distributeur.

Conseils pour un bon entretien :

- Conserver l'appareil à l'abri de l'humidité, des moisissures, de l'eau, de la pluie, de la poussière et de la chaleur
- Ne pas placer l'appareil à proximité de liquide inflammable
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur : radiateur, chauffage, soleil
- Pour éviter les risques d'électrocution, ne pas tenter d'ouvrir l'appareil et d'intervenir par vous même. Cela annulera la Garantie.
- Eviter les chocs, tremblements, pressions et chutes de l'appareil
- Ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni à l'origine
- Les enfants peuvent utiliser l'appareil à condition d'avoir été entraînés, et sous la supervision d'un adulte.


3 Contenu

La boîte contient :

- 1 télé-agrandisseur
- 1 écran 16 pouces / 40 cm (dans un support magnétique de transport)
- 1 adaptateur secteur à double sortie USB
- 2 câbles USB – USB C (pour brancher le télé-agrandisseur et l'écran à l'adaptateur secteur)
- 1 câble mini- HDMI – mini HDMI (pour brancher l'écran au télé-agrandisseur)
- 1 cale (pour maintenir le bras soutenant la tête lorsque l'écran est posé dessus)
- 1 clé Allen (pour le réglage de la force du bras)
- 1 notice
- 1 sacoche de transport

4 Montage

- Installer le plateau bien à plat sur une table ou un bureau.
- Soulever le bras et installer la cale. Cette cale permet de maintenir le bras lorsque l'écran sera posé sur la tête. Remarque : sans cette cale, le bras ne tiendra pas sous le poids de l'écran.

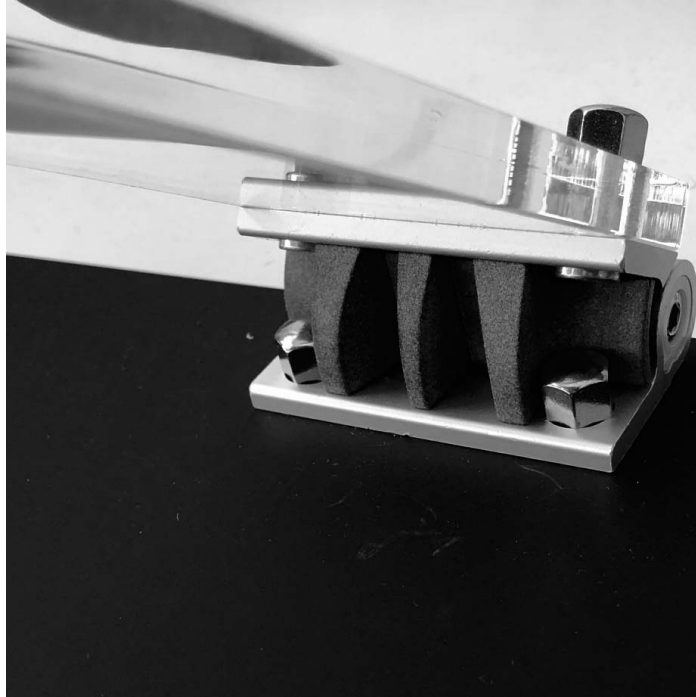

- Ouvrir les 2 charnières support écran situées sur la tête .



- L'écran est rangé dans la sacoche à l'intérieur d'un support magnétique


replié, qui fait alors office de protection pour le transport. Enlever l'écran de son support magnétique.

- Placer l'écran sur les charnières, bien au milieu de la tête, en veillant à ce que les ergots de maintien soit bien placés à l'avant et sous l'écran. L'écran est alors tenu par les 2 charnières à l'arrière, et par les 2 ergots sur l'avant.



- Si la tête pivote légèrement vers l'arrière sous le poids de l'écran, serrez la charnière située entre le bras et la tête en utilisant la clé Allen fournie.
- Brancher le câble USB entre la tête et le bloc secteur : USB-C coté tête, USB coté bloc secteur.
- Brancher le câble USB entre l'écran et le bloc secteur : USB-C coté écran, USB coté bloc secteur.
- Brancher le câble mini-HDMI / mini-HDMI entre l'écran et la tête.

5 Description de la tête et des boutons

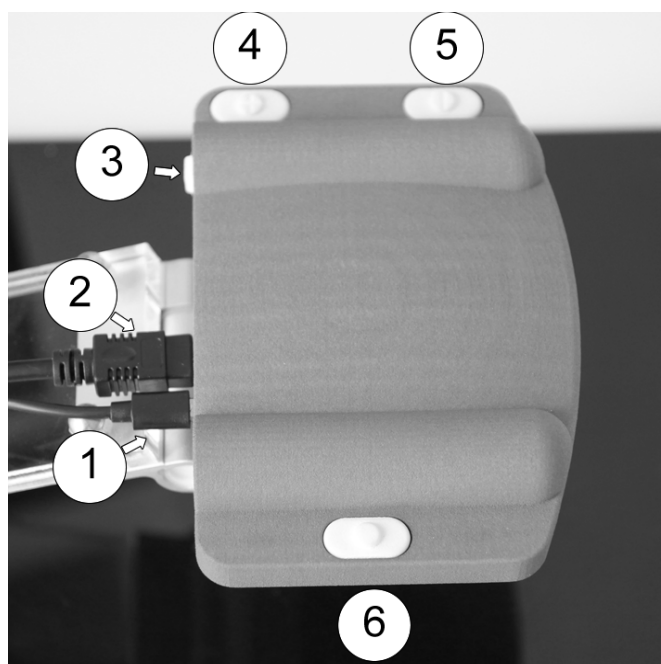

- 1 : Branchement USB C pour câble adaptateur secteur
- 2 : Branchement mini HDMI pour câble écran
- 3 : Marche - Arrêt : faire coulisser pour allumer / éteindre
- 4 : Bouton Zoom +
- 5 : Bouton Zoom -
- 6 : Bouton Contraste

6 Utilisation

Installation

Vérifier le montage de l'appareil. Si besoin, resserrer les charnières du bras à l'aide de la clé Allen fournie.

Poser un texte à agrandir sur le plateau..

Allumage

Brancher l'Adaptateur secteur sur le courant. Placer un texte sur le plateau.

Coulisser le bouton marche-arrêt. En fonction des écrans, l'image apparaît au bout de 4 à 6 s.

Pour éteindre, coulisser de nouveau l'interrupteur marche-arrêt.

Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité.

Remarque : l'écran s'allume automatiquement. Pour forcer une allumage manuel, appuyer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran.

Autofocus

La caméra Autofocus se règle toute seule.

Pour faciliter le travail de l'Autofocus, un minimum de lumière de 150 lux est conseillé.

Astuce : Si l'Autofocus ne se règle pas tout de suite, vous pouvez poser la main sur le texte (plateau) jusqu'au déclenchement du réglage.

Zoom

Appuyer sur les boutons Zoom + et Zoom – pour régler le grossissement.

Lorsque la caméra est situé à 15 cm au dessus du texte, avec un écran 60 cm de diagonale, le grossissement varie de 2x à 32x. Ce grossissement s'affiche en haut à droite de l'écran.

Astuce : les boutons peuvent être pincés, ce qui peut faciliter la manipulation.

Contraste

Sélectionner le contraste qui vous procure le maximum de confort visuel :

Mode Naturel : affiche les couleurs et contrastes naturels. Ce contraste est adapté pour les photos

Mode Noir sur Blanc : affiche les textes en noir sur blanc, contraste renforcé. Ce contraste est adapté à la lecture de texte de journal

Mode Blanc sur Noir : affiche les textes en blanc sur noir, contraste renforcé. Ce contraste est adapté à la lecture de texte de journal. Il est moins lumineux que le mode Noir sur Blanc. Il est donc recommandé aux personnes sensibles à l'éblouissement.

Mode BLUECUT® Jaune sur Noir : affiche les textes en jaune sur noir, contraste renforcé. Ce contraste est adapté à la lecture de texte de journal. Il est moins lumineux que le mode Noir sur Blanc, et il limite la production de lumière bleue. Il est donc recommandé aux personnes sensibles à l'éblouissement et à la lumière bleue.

7 Garantie

La garantie est valide sur fourniture de la facture d'origine.

La garantie est de type « retour usine ». Les frais de retour sont à la charge du client.

La garantie est de 2 ans pour l'appareil.

La garantie ne sera pas couverte dans les cas suivants :


- Dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil
- Effacement ou Destruction du numéro de série
- Ouverture de l'appareil sans accord préalable
- Dommages provoqués par accident ou mauvaise usage diverses tel que chute, utilisation d'un mauvais adaptateur, immersion, aspersion, échauffement, choc, casse, rayure, solvant, etc

- Dommages provoqués par des catastrophes naturelles tels que Tremblement de terre, inondation, incendie, foudre, etc
- Tout dommage non lié à la qualité de l'appareil

Remarque : le carton d'emballage, le sac de transport et la notice ne sont pas couverts par la garantie

8 Caractéristiques principales

- Grossissement 2x à 32x – 4 contrastes
- Ecran 16 pouces (40 cm) résolution full HD 1920x1080
- Caméra capteur SONY 8 MP autofocus couleur
- Dimensions plateau : 400 x 290 mm
- Poids avec écran : < 2.5 kg
- Repliable et transportable dans la sacoche fournie
- 230 V – 50 Hz – 6W (télé-agrandisseur) + 10W (écran)
- Fabriqué en France par Thomas Sinclair Laboratoires

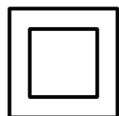

SN :

9 Distributeur

THOMAS SINCLAIR LABORATOIRES
Tour CIT, 3 rue de l'Arrivée
75015 PARIS, FRANCE

www.thomassinclairlabs.com

Tel : 01 43 20 07 99

Email : contact@thomassinclairlabs.com

