

Vidéo agrandisseur OrCam Read 3

Guide de Démarrage Rapide

Installation

1. Allumez l'appareil OrCam Read 3.
2. Connectez le OrCam Read 3 à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C.
3. Placez le OrCam Read 3 sur le support fourni.
4. Sur votre ordinateur, rendez-vous sur cast.orcam.com
5. Appuyez sur « Démarrer »
6. Créez un compte en utilisant votre compte Google ou Apple ou votre nom et adresse e-mail.
7. Cliquez sur « Connecter via USB » pour connecter votre ordinateur à l'appareil OrCam Read 3.

Utilisation du vidéo agrandisseur

1. Placez un livre ou un texte sous la caméra du OrCam Read 3.
2. Disposez le de texte de sorte que tout soit clairement visible.
3. Appuyez sur le bouton étoile au centre de la barre de boutons.
4. Si demandé, veuillez autoriser l'accès à votre caméra et microphone. Ces autorisations sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application web.
5. Le OrCam Read 3 OrCam Read 3 va prendre une photo du texte et va l'analyser. Ensuite, il effectuera un résumé du texte.
6. Vous pouvez poser des questions concernant le texte ou des questions générales.
7. Si vous voulez que le dispositif lise le texte à haute voix, appuyez sur l'icône « Livre Audio » pour passer en mode de lecture de texte.
8. Utilisez la barre d'outils latérale gauche pour zoomer et dézoomer, basculer entre les modes texte et image, faire pivoter l'image, changer le contraste et ajuster la luminosité.
9. Appuyez sur le bouton de téléchargement pour sauvegarder l'image capturée, copier le texte et télécharger le fichier de transcription audio.

Téléchargement de fichier

1. Vous pouvez télécharger différents types de fichiers contenant du texte et utiliser la loupe pour les lire à haute voix.
2. Appuyez sur l'icône + et sélectionnez « télécharger un fichier »
3. Sélectionnez le fichier désiré depuis votre ordinateur.