

- Notice d'utilisation -

Montres Parlantes à aiguilles 1 Bouton

- Réf : 31003-31004-31013 et 31213 –

Version Mai 2023

1. DESCRIPTION

La montre 31013 correspond au modèle Homme et les montres 31003, 31004, 31213 correspondent au modèle Femme. La différence entre ces deux références réside dans la taille du boîtier plus importante pour le modèle Homme.

Ces montres parlantes à 1 bouton contiennent 2 mouvements indépendants :

- l'un visible sur le cadran à aiguilles, réglable uniquement par une personne voyante
- l'autre correspondant à l'heure annoncée par la synthèse vocale entièrement réglable par une personne non-voyante.

Remarque : L'heure affichée par les aiguilles peut donc être différente de celle annoncée par la synthèse vocale.

Le bracelet de ces montres est en cuir.

Il possède une boucle en fer qui doit être positionnée vers le haut pour bien positionner la montre à son poignet.

Les boîtiers de ces montres sont de forme ronde. Elles sont simples d'utilisation puisque seuls 2 boutons saillants subsistent, les autres boutons de réglage étant placés de manière discrète sur les côtés des boîtiers.

1.1. Les boutons saillants

Lorsque la boucle en fer est positionnée vers le haut, on les trouve sur le côté droit du boîtier.

- Celui du milieu sert au réglage de l'heure affichée par les aiguilles.
- Celui du haut permet le déclenchement de l'annonce de l'heure par la synthèse vocale.

1.2. Les boutons discrets

Ils sont placés en bas à gauche et en bas à droite des boîtiers.

Ils servent au réglage de l'heure annoncée par les synthèses vocales :

- Celui situé en bas à gauche des boîtiers sert au réglage des heures.
- Celui situé en bas à droite sert au réglage des minutes.

2. ALIMENTATION

Ces montres sont alimentées, aujourd'hui, par 1 seule pile : celle de la synthèse vocale.

De ce fait, la durée de vie de cette unique pile est réduite par rapport aux versions précédentes (moins d'un an).

3. MISE EN SERVICE

Pour mettre votre montre en service, retirez d'abord le taquet (rouge) positionné sous la molette de réglage des aiguilles en le tirant vers l'extérieur.

Poussez ensuite le remontoir vers la montre pour activer le mouvement des aiguilles.

La partie vocale de votre montre, sera activée par vos soins, en laissant un doigt appuyé sur le bouton B (annonce de l'heure). Il vous restera à effectuer les réglages que vous souhaiterez (voir paragraphe 4).

4. REGLAGES

4.1 Réglage de l'heure annoncée vocalement :

Munissez-vous d'une pointe de stylo afin de régler l'heure exacte de la synthèse vocale en pressant chaque bouton jusqu'à obtenir l'heure souhaitée.

- Utilisez le bouton situé en bas à gauche du boîtier pour faire varier les heures.
- Pressez le bouton situé en bas à droite pour faire varier les minutes.

Notez bien que dans les 2 cas, les chiffres ne peuvent varier qu'en augmentant.

Ainsi, si vous dépassez l'heure souhaitée, vous devrez refaire le tour complet des chiffres pour y revenir.

4.2 Réglage de l'heure affichée par les aiguilles :

Remarque : ce réglage ne peut être effectué que par une personne voyante.

- Tirez vers l'extérieur la mollette située au milieu du côté droit du boîtier.
- Tournez-la vers l'avant ou l'arrière pour parvenir à l'heure souhaitée.
- Repoussez-la vers l'intérieur une fois l'heure souhaitée atteinte.

5. Garantie :

Ces montres sont garanties 1 an.

En cas de panne ou de changement de piles, veuillez déposer l'article au magasin ou nous le retourner à vos frais.

Il doit être accompagné de son emballage d'origine, et sa facture ou son bon de garantie.

Sans ces éléments la garantie n'est pas valide.

Le bracelet ainsi que les piles ne sont pas garantis.

De même, toute détérioration due à l'humidité ainsi que l'appui trop fort sur les boutons annulent également la garantie.