

## Références : 26165 et 26195 Manuel d'utilisation de Claria Zoom



ClariaZoom est une application compatible avec tous les terminaux Android (4.2 et supérieur) et qui procure à l'utilisateur un confort de lecture inégalé sur smartphone ou tablette. Cette interface complète permet à toutes les personnes en situation de basse vision d'agrandir les textes et de changer les contrastes afin d'utiliser facilement toutes les fonctionnalités de leur terminal.

### **1. Comment télécharger et mettre à jour l'application ClariaZoom ?**

Pour télécharger ClariaZoom, commencez par ouvrir l'application Play Store. Si vous n'avez pas de compte associé, ajoutez-en un. Cliquez ensuite sur la barre de recherche et tapez ClariaZoom. Sélectionner "ClariaZoom", cliquez sur "Installer" puis "Accepter" pour démarrer le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé et l'application installée, vous pouvez commencer à utiliser ClariaZoom.

A la première ouverture de l'application ClariaZoom, un tutoriel vous est proposé. Nous vous recommandons fortement de le suivre afin d'apprendre les gestes clés de l'application. Si vous

souhaitez revoir le tutoriel, vous pouvez y accéder à nouveau en vous rendant dans les Réglages Claria, "A propos" puis "Revoir le tutoriel".

Pour mettre à jour l'application, nous vous recommandons d'activer les mises à jour automatiques. Vous bénéficierez ainsi automatiquement des dernières nouveautés. Pour cela, rendez-vous dans le Play Store, déployez le menu latéral en faisant glisser un doigt depuis la gauche de l'écran et cliquez sur "Paramètres". Dans "Mise à jour automatique des applis", sélectionnez "Mettre à jour automatiquement les applications via Wi-Fi uniquement".

## 2. Gestes généraux de l'interface

**Gestes d'agrandissements :** Excepté l'écran d'accueil qui se présente sous forme d'icônes, il est possible de modifier la taille de tous les textes de l'interface ClariaZoom. Pour agrandir un texte, effectuez un geste de zoom en posant deux doigts sur l'écran et en les écartant. Pour le réduire, réalisez le geste inverse en les rapprochant. Une fois que vous avez adapté les textes à la taille qui vous convenait, vous pouvez verrouiller ce paramètre dans la catégorie "Ecran" des Réglages Claria.

**Changer les contrastes :** Il est également possible de modifier les contrastes de l'application ClariaZoom afin de disposer du meilleur confort de lecture possible. Quatre contrastes différents existent actuellement (Noir sur blanc, blanc sur noir, jaune sur noir, jaune sur bleu). Pour passer de l'un à l'autre, il suffit d'effectuer un clic à 3 doigts sur l'écran. Vous pouvez également le choisir depuis les réglages Claria, catégorie "Ecran".

**Clic long :** Dans certaines listes, un clic long sur un élément peut vous permettre d'accéder à des options supplémentaires. Par exemple, dans l'application Contacts, un clic long sur un contact permet de le modifier, ou le supprimer et même d'appeler ou d'envoyer un SMS ou mail à ce dernier. Pour effectuer un clic long, cliquer sur un élément et maintenez votre doigt sur ce dernier.

**Vocalisation à la demande :** En cas de fatigue visuelle ou si la lisibilité est mauvaise (lumière, reflets...), il est possible d'activer la vocalisation temporaire. Sur la majorité des écrans de contenu (SMS, Emails...), un bouton "Vocalisation" vous permet de l'activer. Mais il est également possible de l'activer dans tous les autres écrans, comme les listes par exemple. Pour cela, il suffit de faire glisser deux doigts vers le bas sur l'écran. L'appareil lira alors à voix haute l'élément situé en haut de l'écran.




Il est également possible d'activer la vocalisation en permanence en vous rendant dans les Réglages Claria.

## 3. Présentation de l'écran d'accueil

Votre nouvel écran d'accueil ClariaZoom est composé de 3 parties différentes : La barre d'état tout en haut (état du réseau, de la connexion Wifi, heure...), vos applications préférées disposées sous forme d'icônes, et les boutons d'actions ("i", "Liste des apps", "Composer") sur la partie basse.

Bouton "i" : Ce bouton vous permet de consulter l'état de votre terminal en grands caractères : Heure, connexion réseau, connexion internet, Etat de la batterie, mode son, Alarme, GPS, Bluetooth, Date)

Bouton "Liste des apps" : Ce bouton vous donne accès à la liste complète des applications installées sur votre appareil. Vous

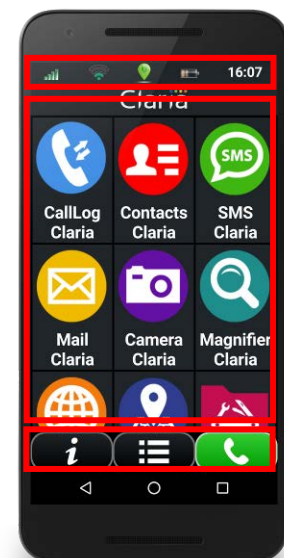

pouvez filtrer les apps selon leurs premières lettres en appuyant sur le bouton "Loupe" situé en bas à droite de cet écran.

Bouton "Composer" (uniquement sur les téléphones): Ce bouton vous permet d'accéder directement au clavier numérique afin de composer un numéro de téléphone à appeler.

#### 4. Comment personnaliser votre écran d'accueil ?

Il est possible de personnaliser votre écran d'accueil pour choisir le type d'affichage (Textes ou icônes), le nombre de colonnes ou tout simplement les applications présentes sur celui-ci.

Lorsque vous ouvrez ClariaZoom pour la première fois, l'accueil se présente sous forme d'icônes rassemblées en deux colonnes. Lorsque vous descendez tout en bas de cet écran, vous pouvez cliquer sur le bouton "Editer" pour entrer en mode "Edition".

**Type d'affichage :** Un clic sur le bouton Menu "M" situé tout en bas, au milieu, vous donne accès à plus d'options et vous permet de choisir le design des icônes, d'afficher le nom des applications ou même de revenir à un écran d'accueil sous forme de texte. Si vous sélectionnez cette option, vous pourrez revenir à la présentation sous forme d'icônes en vous rendant dans les Réglages Claria, Catégorie "Ecran" puis "Paramètres Accueil"

**Nombre de colonnes :** En mode édition, des boutons "+" et "-" apparaissent et vous permettent de modifier le nombre de colonnes de l'écran d'accueil.

**Organiser vos application :** En mode édition, une icône "Ajouter" (se présentant sous la forme d'un + dans un cercle rouge) apparait et vous permet de rajouter une application ou de créer un dossier pour y regrouper plusieurs applications. Cliquez simplement dessus puis sélectionnez votre application dans la liste pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Déplacez-la ensuite à l'endroit voulu en utilisant les flèches en bas de l'écran. Vous pouvez déplacer ou retirer n'importe quelle application de l'écran d'accueil en cliquant sur celle-ci depuis le mode Edition. Celles-ci ne seront pas supprimées de votre appareil.

Si vous créez un dossier, sortez du mode « Edition » en appuyant sur Ok puis cliquez sur le dossier pour entrer dedans. Vous y trouverez un bouton "Editer" vous permettant d'entrer en mode Edition afin de paramétrer ce dernier.


#### 5. Comment choisir ClariaZoom comme application d'Accueil et de SMS par défaut ?

L'application ClariaZoom vous permet de disposer d'un écran d'accueil avec de grandes icônes facilement paramétrable. Pour sélectionner ClariaZoom en tant qu'écran d'accueil par défaut, rendez-vous dans les Réglages ClariaZoom, puis Interactions Android et "Accueil par défaut". Sélectionnez ClariaZoom. Vous venez de choisir votre nouvel écran d'accueil.

Afin d'utiliser ClariaZoom pour envoyer vos SMS, rendez-vous également dans les Réglages ClariaZoom et Interactions Android. Sélectionnez Application SMS par défaut puis valider en appuyant sur "Oui".

#### 6. Comment paramétrer et utiliser ClariaZoom Plus ?

La fonctionnalité ClariaZoom Plus vous permet de profiter du confort de l'interface ClariaZoom pour les textes de n'importe quelle application. Pour la paramétrer, allez dans les Réglages Claria puis dans "Interactions Android".

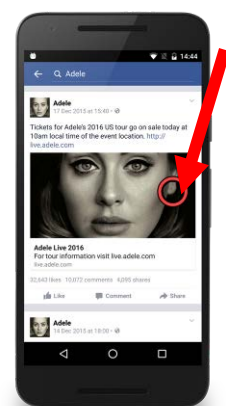

Un clic sur "ClariaZoom Plus" vous emmène directement dans les réglages d'Accessibilité de votre terminal. Cliquez sur ClariaZoom Plus, activez la fonctionnalité et confirmez en appuyant sur OK. Vous verrez apparaître le bouton d'action ClariaZoom Plus sous la forme d'un cercle Rouge et Noir sur votre écran.

Un clic sur « Paramètres » dans la fenêtre d'activation de ClariaZoom Plus vous permet également de modifier à votre convenance les formes, couleurs et taille du bouton ClariaZoom Plus.

Pour utiliser ClariaZoom Plus, rien de plus simple : un clic court vous permet d'importer l'ensemble de la page visible dans l'interface ClariaZoom dans laquelle vous pouvez agrandir facilement les textes ou changer les contrastes. Un clic long permet d'importer uniquement le texte sous le bouton ClariaZoom Plus. Pour déplacer ce dernier, il suffit de cliquer dessus et de faire glisser son doigt sur l'écran à l'endroit souhaité.

Une fois dans l'écran de texte importé, un point en début de ligne indiquera qu'une action est possible en cliquant dessus (il s'agit donc de lien, bouton..) tandis qu'un crayon indiquera un champ de saisie de texte.

### **7. Comment utiliser le clavier ClariaZoom dans d'autres applications ?**

L'application ClariaZoom dispose d'un clavier avec de grands caractères et des contrastes forts. Un appui long sur une lettre vous permet en plus d'afficher celle-ci en très grand sur la partie supérieure de l'écran.

Il est possible d'utiliser le clavier de ClariaZoom dans toutes vos applications afin de profiter du même confort d'écriture dans tout votre appareil. Pour cela, rendez-vous dans les Réglages Claria puis dans Interactions Android et Clavier Android Standard. Validez puis cochez "Clavier ClariaZoom" et appuyer sur Ok. Validez à nouveau puis sélectionner "Clavier ClariaZoom". Vous pouvez maintenant utiliser le clavier ClariaZoom dans toutes vos applications.

### **8. Comment utiliser la reconnaissance vocale ?**

L'application ClariaZoom dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance vocale qui permet d'appeler et d'écrire un message à un contact mais également de dicter du texte.

Pour dicter un texte, rien de plus simple (SMS,email, adresse, ...). Lorsque vous êtes dans un champ de saisie de texte, cliquez simplement sur le bouton "Micro" présent sur le clavier et commencez à parler après la vibration. Une fois que vous avez fini de parler, ClariaZoom vous laissera le choix entre plusieurs propositions. Sélectionnez la proposition qui vous convient en cliquant dessus pour retourner dans le champ de saisie de texte. Vous pouvez ensuite continuer à écrire, dicter la suite en appuyant à nouveau sur la touche "Micro" ou valider votre saisie.



Pour lancer un appel ou créer un SMS vocalement (uniquement sur téléphone), lancer l'application "Raccourcis Claria" depuis la liste des apps et dites « Appeler Alain » ou « Ecrire à Marie ». Vous pouvez également attribuer des associations vocales à certains contacts. Si vous dites par exemple « Appeler Papa », le téléphone vous demandera si vous voulez « ajouter une association vocale » afin d'associer un contact à « Papa ». Une fois l'association créée, le téléphone choisira automatiquement le bon contact la prochaine fois.

### **9. Avoir accès à toutes les fonctionnalités de ClariaZoom**

Lorsque vous téléchargez l'application ClariaZoom, vous disposez de 30 jours d'essai gratuits pour essayer toutes les fonctionnalités. Au-delà, si vous souhaitez débloquer tous les usages de l'application ClariaZoom (SMS, Emails, GPS, Loupe électronique, ClariaZoom Plus...), deux possibilités s'offrent à vous : La souscription via le Google Play Store ou l'achat d'une licence ClariaZoom chez un de nos distributeurs.

Pour souscrire à l'abonnement, cliquez simplement sur l'icône "S'abonner" tout en bas de votre écran d'accueil ClariaZoom et suivez la procédure. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez besoin de d'associer vos coordonnées bancaires à votre compte Google Play Store.

Pour utiliser une clé de licence achetée auprès d'un de nos distributeurs, allez dans les Réglages Claria, "A propos" puis "Insérer une clé de licence". Inscrivez votre clé (en lettres minuscules et avec les tirets) et validez. Vous disposez désormais de tous les usages de ClariaZoom sur votre terminal.