

VOXIONE

Manuel de l'utilisateur

Version 2.0


1/ Premiers pas	01
2/ Mode loupe	12
3/ Mode Applications - Smartphone	20
4/ Téléphonie	40
5/ Saisie de texte	50
6/ Commandes vocales	60
7/ Paramètres	66

Toute l'équipe de Voxiweb vous remercie d'avoir fait l'acquisition d'un VoxiOne.

1/ PREMIERS PAS

Contenu du coffret

- VoxelOne
- Coque de protection
- Accessoires (se trouvent dans la boîte, sous le VoxelOne)
 - Tour de cou détachable
 - Ecouteurs avec télécommande + Adaptateur Jack USB Type-C
 - Chargeur secteur + câble USB Type-C
 - Base de recharge sans-fil
 - Etiquettes QRCode x50
 - Adaptateur USB Type-C / Type-A
 - Guide-doigts
 - Outil d'éjection carte SIM

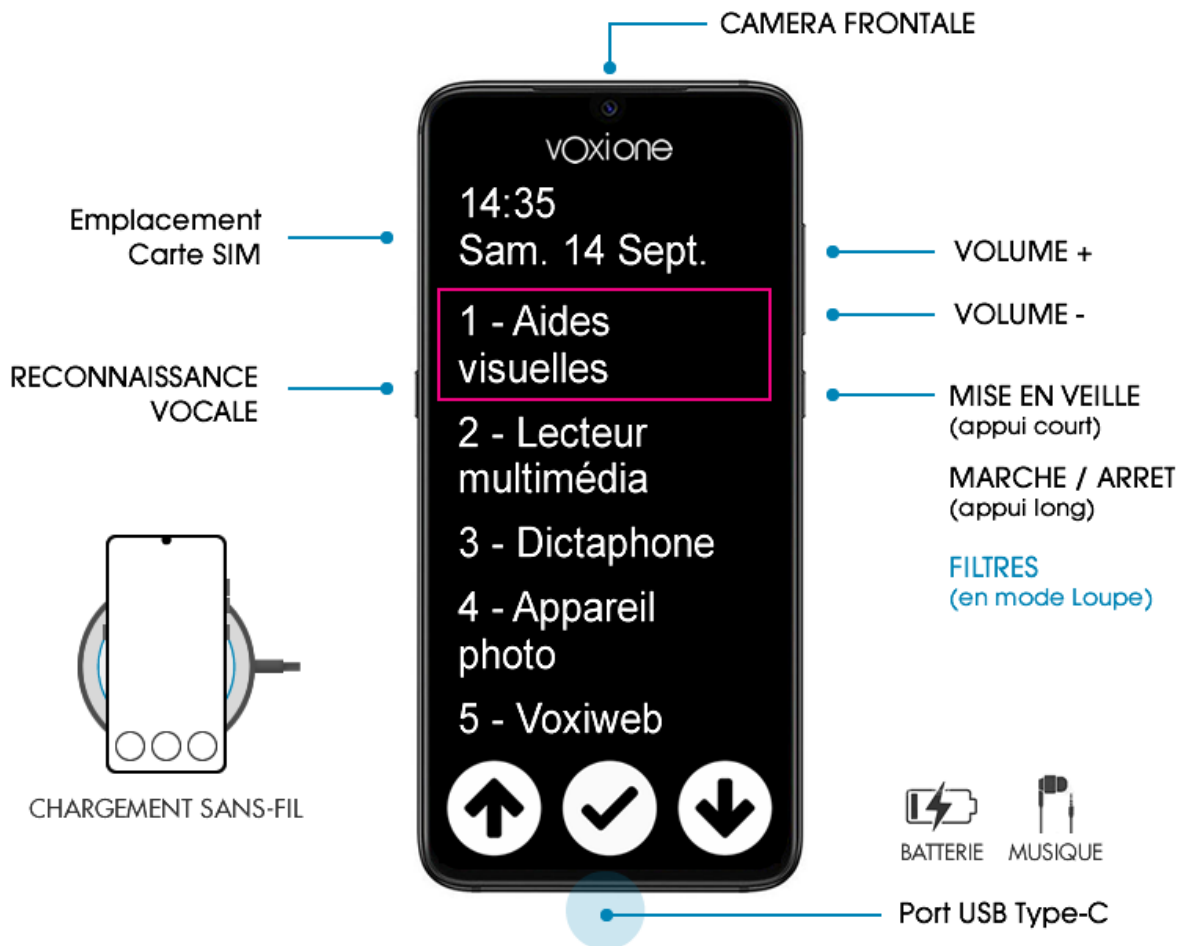



Chaque fois que vous verrez ce symbole dans le manuel, cela indiquera qu'il existe une commande vocale associée à une action.

Insertion de la carte SIM

La carte SIM (format nano SIM) n'est pas obligatoire pour utiliser votre VoxiOne, mais l'est uniquement pour profiter des fonctions Téléphonie.

Avant de commencer la procédure, vérifiez que votre VoxiOne est éteint et que la coque de protection a bien été enlevée.

Pour enlever la coque de protection, mettez le VoxiOne de dos, la coque face à vous. Tirez ensuite les 2 coins en bas (il y a des encoches striées dans les angles du bas). La coque s'enlèvera alors sans forcer.

L'emplacement pour les cartes SIM se trouve tout en haut sur la tranche gauche du VoxiOne. Insérez l'outil d'éjection carte SIM (fourni dans la boîte d'Accessoires) dans le trou sous l'emplacement des cartes SIM. Vous entendrez alors un petit clic, et vous n'aurez qu'à tirer délicatement le tiroir carte SIM.

Introduisez votre carte SIM dans l'un des 2 emplacements, puis replacez le tiroir carte SIM dans son emplacement.

Marche / Arrêt

Pour allumer votre VoxiOne, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt, jusqu'à sentir une vibration. Le bouton Marche / Arrêt se situe sur la tranche de droite sous les touches de volume. Si le VoxiOne ne s'allume pas, vous devrez peut-être charger la batterie.

Pour éteindre votre VoxiOne, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt puis sélectionnez le choix Eteindre.



DITES

« **éteindre** » : éteindre le VoxiOne

Premier démarrage et configuration

Lors de votre 1^{er} démarrage, un tutoriel interactif se lancera automatiquement et vous apprendra comment utiliser votre VoxiOne.

A la fin de ce tutoriel, vous pourrez choisir vos paramètres d'accessibilité : contraste, taille du texte et synthèse vocale.

Mise en veille / Sortie de veille

L'appareil se met automatiquement en veille au bout de 2 minutes d'inactivité.

En mode Loupe, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt et sélectionnez l'option Mettre en veille.

En mode Smartphone / Applications, faites un appui court sur le bouton Marche / Arrêt et le VoxiOne se mettra en veille instantanément.



DITES

« **veille** » : mettre en veille

Pour sortir du mode veille, appuyez 2 fois sur le bouton Marche / Arrêt. Ce paramétrage est prévu pour éviter un allumage non désiré dans une poche ou un sac.

Barre de navigation

Vous allez pouvoir effectuer toutes les actions à l'aide des 3 boutons situés dans la barre de navigation en bas de votre VoxiOne.

Si vous avez installé le guide-doigts, la barre de navigation est représentée par ce guide-doigts.

En fonction du contexte, les fonctions des 3 boutons peuvent changer.

MODE NAVIGATION



- **Bouton gauche** : Choix précédent
- **Bouton milieu** : Valider un choix
- **Bouton droite** : Choix suivant

MODE LOUPE




- **Bouton gauche** : Zoom Moins
- **Bouton milieu** : Gel image (appui court),
Reconnaissance de texte / OCR (appui long)
- **Bouton droite** : Zoom Plus

LECTEUR MULTIMEDIA



- **Bouton gauche** : Retour rapide (appui court), Chapitre / morceau précédent (appui long)
- **Bouton milieu** : Lecture / Pause
- **Bouton droite** : Avance rapide (appui court), Chapitre / morceau suivant (appui long)

Gestes

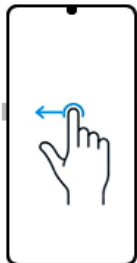

Retour

Effectuez un balayage avec un doigt de la droite vers la gauche



Options

Appuyez avec 2 doigts sur l'écran



Accueil

Appuyez de manière prolongée avec 2 doigts sur l'écran

Passer du mode Loupe au mode Applications / Smartphone

VoxiOne propose 2 modes distincts : Loupe et Applications (aussi appelé Smartphone si carte SIM détectée).

Faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt et sélectionnez le mode désiré en utilisant les flèches de la barre de navigation.



DITES

« **loupe** » : lancer le mode Loupe ou

« **applications** » ou « **smartphone** » : lancer le mode Applications / Smartphone

Chargement

Le VoxiOne peut être rechargé de manière filaire ou sans-fil.
Branchez le chargeur secteur sur votre prise de courant.

Filaire : Reliez le câble USB Type-C du chargeur secteur vers le port USB Type-C de votre VoxiOne (situé sur la tranche du bas, au milieu).

Sans-fil : Reliez le câble USB Type-C du chargeur secteur vers le port USB Type-C de la base de recharge sans-fil. Posez votre VoxiOne sur la base de rechargement (attention à bien positionner votre VoxiOne au milieu de la base - un cercle s'illuminera alors en vert).

Lorsque le chargement démarrera, vous aurez le message sonore « Batterie en charge », ainsi que le niveau de charge.

Lorsque la batterie passe sous les 10%, vous aurez une notification au niveau de l'écran d'accueil.

Pour connaître à tout moment le niveau de batterie, utilisez la reconnaissance vocale.



DITES

« **batterie** » : connaître l'état de la batterie

Ecouteurs

Une paire d'écouteurs filaire est fournie avec votre VoxiOne, ainsi qu'un adaptateur Jack vers Type-C. Pour relier vos écouteurs à votre appareil, il suffit de les brancher dans le port USB Type-C de votre VoxiOne (situé sur la tranche du bas, au milieu).

Les écouteurs sont équipés d'un bouton (situé sur le cordon) qui permet plusieurs fonctions :

- Téléphonie : prendre un appel / raccrocher
- Musique : lecture / pause (1 appui), chapitre / morceau suivant (2 appuis successifs)

A noter qu'il n'est pas possible d'utiliser des écouteurs et recharger votre appareil en même temps.

2/ MODE LOUPE

Par défaut, votre VoxiOne démarre en mode Loupe.

Pour passer en mode Loupe depuis le mode Applications / Smartphone, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt et choisissez l'option « Basculer vers Loupe ».



DITES

« **loupe** » : basculer vers le mode Loupe

La loupe peut être utilisée en mode portrait ou paysage. Lorsque vous basculerez la loupe, l'orientation sera annoncée par la synthèse vocale.

Barre de navigation



- **Bouton gauche** : Zoom Moins
- **Bouton milieu** : Gel image (appui court),
Reconnaissance de texte / OCR (appui long)
- **Bouton droite** : Zoom Plus (jusqu'à x8)

Vous pouvez zoomer à l'aide des boutons de droite ou de gauche ou utiliser la reconnaissance vocale pour sélectionner un niveau précis de zoom.



DITES

« **zoom 6** » : sélectionner le niveau de zoom x6

Gel image

Pour geler l'image, appuyez sur le bouton du milieu représenté par un appareil photo.

Une fois l'image gelée, vous pouvez vous déplacer au sein de cette image et l'agrandir / réduire, en pinçant vos doigts sur l'écran.

Les boutons de la barre de navigation changent en mode Image gelée.



- **Bouton gauche** : Lancer la reconnaissance de texte
- **Bouton milieu** : Quitter le mode Gel image
- **Bouton droite** : Options de sauvegarde (image, PDF et texte)

Filtres

En appuyant sur le bouton Marche / Arrêt, situé sur la tranche droite du VoxelOne, vous pouvez modifier le filtre. En plus de la couleur naturelle, vous avez le choix entre 6 filtres différents :

- Texte blanc sur fond noir
- Texte noir sur fond blanc
- Texte jaune sur fond bleu
- Texte bleu sur fond jaune
- Texte jaune sur fond noir
- Texte noir sur fond jaune

Par défaut, le dernier filtre utilisé est sauvegardé.

Lors du prochain appui sur le bouton Marche / Arrêt, vous aurez dans l'ordre suivant : votre filtre sauvegardé, couleur naturelle puis la liste des autres filtres.

Reconnaissance de texte (OCR)

La reconnaissance de texte permet d'extraire du texte à partir d'une image.

Pour lancer la reconnaissance de texte, effectuez un appui long sur la touche du milieu (représentée par un appareil photo).



DITES

« **scan** » : lancer la reconnaissance de texte

La reconnaissance de texte fonctionne sans connexion Internet, mais pour une restitution de meilleure qualité, nous vous conseillons de connecter le VoxiOne à Internet.

Une fois connecté à Internet (en Wi-Fi ou 4G), l'OCR propose des fonctions avancées comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite ou la détection du sens d'un document.

Une fois le texte extrait, la lecture se lance automatiquement.

Le bouton du milieu permet de mettre en pause la lecture et de la reprendre.

Un appui court avec 2 doigts sur l'écran (geste Options), vous permet d'atteindre les options de l'OCR :

- Sauvegarde au format texte
- Traducteur avec la liste des différentes langues supportées

Traducteur

L'utilisation du traducteur nécessite une connexion Internet.

A partir du résultat de votre reconnaissance de texte, si vous choisissez l'option Traducteur, votre texte sera automatiquement traduit et lu avec la synthèse vocale dans la langue demandée.

Un appui court avec 2 doigts sur l'écran (geste Options), vous permet alors de sauvegarder le résultat de la traduction dans le Stockage interne de votre VoxiOne.

En plus du français, la reconnaissance de texte peut automatiquement détecter jusqu'à 15 langues et les lire dans la langue détectée. Par exemple, si vous utilisez votre VoxiOne avec un article en anglais, celui-ci sera retranscrit et lu en anglais, et vous pourrez également le traduire.

Pour revenir à l'accueil de la loupe, faites un appui long avec 2 doigts sur l'écran.



DITES

« **accueil** » : retourner à l'accueil de la loupe

Eclairage

Votre VoxiOne bénéficie d'un capteur de basse lumière qui permet d'augmenter automatiquement la luminosité dans un environnement sombre, sans faire appel à un éclairage externe.

Néanmoins, si vous êtes dans une pièce complètement noire, vous pouvez activer l'éclairage.

A partir de l'écran de la loupe, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options, puis choisissez Activer éclairage.

Effectuez la même opération pour désactiver l'éclairage.



DITES

« **éclairage** » : activer / désactiver l'éclairage

Mode lot

Disponible avec l'achat du Pack Machine à lire qui comprend un support A4 pliable et une housse de transport.

Le mode lot permet de numériser à la volée des documents.

A partir de l'écran de la loupe, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options, puis choisissez Mode Lot.



Saisissez le nom du document puis le type de format, vous avez le choix entre 4 possibilités :

- Texte (OCR) dans un seul PDF : Tous les documents dont le texte aura été extrait par l'OCR seront assemblés à la suite, dans un seul fichier PDF.
- Texte (OCR) dans plusieurs fichiers TXT : Création d'un dossier dans lequel, chaque reconnaissance de texte est sauvegardée individuellement dans un fichier au format texte.
- Images dans plusieurs fichiers JPG : Création d'un dossier dans lequel, chaque prise de vue est sauvegardée individuellement dans un format image (JPEG). Aucune reconnaissance de texte.
- Images dans un seul PDF : Toutes les prises de vue sont sauvegardées dans un seul fichier au format PDF.

Descendez le curseur jusqu'à « Démarrer » et validez avec le bouton du milieu.

Une fois le mode lot démarré, positionnez votre premier document puis appuyez sur le bouton du milieu (représenté par un appareil photo) pour capturer ce document. La synthèse vocale vous indique alors de positionner le document suivant, puis appuyez de nouveau sur le bouton du milieu. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous le souhaitez.

Pour terminer votre numérisation à la volée, appuyez sur le bouton de droite (représenté par une coche). Vos documents sont sauvegardés dans le dossier Loupe du Lecteur Multimédia.

3/ MODE APPLICATIONS - SMARTPHONE

Si une carte SIM est détectée, le mode Applications s'appellera Mode Smartphone et proposera les fonctions Téléphonie (voir chapitre suivant).

Pour passer du mode Loupe au mode Applications ou Smartphone, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt et choisissez l'option « Basculer vers Applications » ou « Basculer vers Smartphone ».



DITES

« **applications** » ou « **smartphone** » : basculer vers le mode Applications / Smartphone

AIDES VISUELLES

Lecteur de code-barres

Le lecteur de code-barres vous permet de scanner des produits de la vie quotidienne (aliments, livres, médicaments...) pour vous donner de nombreuses informations (composition aliments, notice de médicaments...).

Positionnez votre VoxiOne à au moins 10 cm au-dessus de votre produit. Notre technologie révolutionnaire est capable de détecter le code-barres automatiquement, et ce sans viser.

Dès qu'un code-barres sera détecté vous sentirez une vibration. Si le produit est disponible dans nos bases de données, alimentées en temps réel, les informations détaillées seront disponibles à l'écran.

Pour utiliser le lecteur de code-barres, vous devez être connecté à Internet.

Lecteur – enregistreur d'étiquettes

Le lecteur - enregistreur d'étiquettes vous permet d'étiqueter vocalement un produit à l'aide des étiquettes fournies (x50). Ces étiquettes résistent au froid et à l'eau.

Prenez une des étiquettes dans la boîte d'accessoires, puis passez votre VoxiOne au-dessus de l'étiquette (attention à positionner votre appareil à au moins 10 cm de l'étiquette).

Dès que l'étiquette sera détectée, vous sentirez une vibration et la synthèse annoncera « Nouvelle étiquette ». Saisissez votre texte (à l'aide du clavier ou avec la reconnaissance vocale), descendez le curseur jusqu'à « Enregistrer » et validez avec le bouton du milieu.

A noter qu'il n'y a aucune limitation de longueur du texte.

Si vous passez votre VoxiOne au-dessus d'une étiquette déjà enregistrée, vous sentirez une vibration et le texte préalablement enregistré sera énoncé par la synthèse vocale.

Appuyez avec 2 doigts sur l'écran pour accéder aux options. A partir de cet écran, vous pourrez modifier le texte associé à l'étiquette ou effacer votre étiquette.

En cas de suppression, lors de la prochaine détection par le VoxiOne, la synthèse vous indiquera nouvelle étiquette et vous pourrez de nouveau associer un texte à cette étiquette.

Les étiquettes sont réutilisables à l'infini.

Les contenus des étiquettes étant stockés sur votre appareil, le VoxiOne propose une fonction de sauvegarde de celles-ci. A partir de l'écran d'accueil du lecteur d'étiquettes, appuyez avec 2 doigts sur l'écran pour accéder aux options.

Vous aurez alors la possibilité d'effectuer une sauvegarde (choix Exporter) qui sera enregistrée dans le dossier Documents du Stockage Interne.

A l'inverse, si vous souhaitez importer une sauvegarde, copiez dans un premier temps votre fichier de sauvegarde dans le dossier Documents du Stockage Interne, puis choisissez Importer des étiquettes. Attention, l'importation écrase les données existantes.

Si vous souhaitez commander des étiquettes supplémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone (02 85 52 41 88) ou par email (contact@voxweb.com).

Détecteur de billets de banque

Le détecteur de billets est ultra rapide et détecte avec précision n'importe quel billet, même en ne présentant qu'une partie du billet devant le VoxiOne.

Dès qu'un billet de banque sera reconnu, sa valeur sera affichée en gros sur l'écran et sera annoncée vocalement.

Le détecteur propose en plus de l'Euro, 6 devises :

- Livre Sterling
- Dollar US
- Dollar canadien
- Franc Suisse
- Couronne suédoise
- Couronne danoise

Pour changer de devise, appuyez avec 2 doigts sur l'écran pour accéder aux options.

La dernière devise sélectionnée est gardée en mémoire lors des prochaines utilisations.

Détecteur de couleurs

Le détecteur de couleurs reconnaît jusqu'à 150 couleurs.

Positionnez votre appareil devant l'objet souhaité, le capteur est situé au dos du VoxiOne. La couleur détectée est annoncée toutes les 2 secondes.

Détecteur de lumière

Le détecteur de lumière affiche le nombre de Lux et indique par une intensité sonore le niveau de luminosité retournée par le capteur de la caméra frontale située sur la face avant de votre VoxiOne. Plus le son sera rapide, plus l'environnement sera lumineux.

LECTEUR MULTIMEDIA

Votre VoxiOne est capable de lire de très nombreux formats :

- Musique : MP3, AAC, M4A, OGG, WAV
- Livres audios : Daisy, ePub
- Photos : JPG, PNG, BMP, GIF, WEBP
- Vidéos : MP4, AVI, MKV, WEBM
- Documents : Word (.docx), PDF, texte

Le Lecteur multimédia regroupe les contenus dans des dossiers différents. Vous avez ainsi les dossiers Musique, Photos, Podcasts, Livres, Vidéos et Documents.

Audio (Musique, Livres, Podcasts) / Vidéo

Lorsque vous consultez un contenu Audio (Musique, Livres Audios, Podcasts) ou Vidéo, les boutons de la barre de navigation changent.



- **Bouton gauche :**
Retour - 10 secondes : 1 appui court
Retour - 1 minute : 2 appuis successifs
Atteindre le début du contenu : 3 appuis successifs
Chapitre / morceau précédent : appui long
- **Bouton milieu :** Lecture / Pause
- **Bouton droite :**
Avance + 30 secondes : 1 appui court
Avance + 5 minutes : 2 appuis successifs
Chapitre / morceau suivant : appui long

Dès que vous commencez la lecture d'un contenu Audio ou Vidéo, votre VoxiOne sauvegarde automatiquement votre position. Lorsque vous retournerez sur ce même contenu, vous aurez la possibilité de reprendre à la position sauvegardée ou de recommencer depuis le début.

Uniquement pour les contenus Audio, vous avez la possibilité de modifier la vitesse de lecture (de x0,5 à x2). Pour changer la vitesse de lecture, une fois dans le contenu Audio, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options.

La vitesse de lecture choisie sera conservée et s'appliquera lors de la lecture des prochains contenus Audio.

A noter, la vitesse de lecture des contenus Audio et la vitesse de lecture de la synthèse vocale sont 2 paramètres totalement distincts.

Pour les contenus Vidéo, vous avez la possibilité de les jouer en Plein écran en tournant votre VoxelOne en mode Paysage. Pour sortir du mode Plein écran, repassez votre VoxelOne en mode portrait.

Photos

Pour les contenus Photos, les boutons de la barre de navigation changent.



- **Bouton gauche** : Photo précédente
- **Bouton milieu** : Fermer visionneuse photo
- **Bouton droite** : Photo suivante

Vous pouvez vous déplacer au sein d'une photo et l'agrandir / réduire, en pinçant vos doigts sur l'écran.

Vous avez également la possibilité d'extraire le texte présent dans une photo (OCR). Positionnez le curseur sur le nom du fichier (sans entrer dedans) et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Choisissez ensuite l'option « Extraire le texte (OCR) ».

Lecteur USB

Avec votre VoxiOne, vous avez la possibilité d'y brancher directement un périphérique USB de stockage (clé USB, disque dur).

En fonction du mode (Applications ou Smartphone), l'accès au lecteur USB est différent :

- En mode Applications, rubrique Lecteur Multimédia > Stockage Interne / Lecteur USB
- En mode Smartphone, rubrique Applications > Stockage Interne / Lecteur USB



DITES

« **lecteur USB** » : ouvrir le lecteur USB depuis le Stockage interne

Votre VoxiOne dispose d'une capacité de stockage de 64Go, dont 52Go disponible. La navigation au sein des dossiers et sous-dossiers est identique à n'importe quel écran de navigation.

Branchez l'adaptateur USB Type-C vers Type-A (fourni dans la boîte d'Accessoires) dans le port USB situé sur la tranche du bas de votre VoxiOne, puis branchez votre périphérique USB. Celui-ci apparaîtra alors sous Stockage interne.

Pour éjecter votre périphérique USB, revenez au niveau de la rubrique Stockage interne où sont listés la mémoire interne et votre périphérique USB et positionner le curseur actif sur le nom de votre périphérique USB. Puis appuyez avec 2 doigts pour accéder aux options et choisissez Ejecter.

Gestion de fichiers

Que ce soit pour le Stockage Interne ou les périphériques USB, vous pouvez, depuis votre VoxiOne, effectuer des opérations sur les fichiers ou dossiers (copier, coller, renommer, supprimer...).

Positionnez le curseur sur le nom du fichier ou dossier souhaité (sans entrer dedans) et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options.

Vous aurez alors à l'écran des informations détaillées sur le fichier (taille, date) et les différentes actions possibles (copier, déplacer, renommer ou supprimer).

Pour copier un fichier ou un dossier, choisissez l'option « Copier », vous aurez alors un message de confirmation. Rendez-vous ensuite dans le dossier dans lequel vous souhaitez coller le contenu.

Puis positionnez le curseur sur le nom du dossier en cours (celui en haut de page), et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options.

Pour déplacer un fichier ou un dossier, choisissez l'option « Coller dans le dossier... » puis effectuez la même opération que pour Copier un fichier.

Pour créer un nouveau dossier, positionnez le curseur sur le nom du dossier en cours (celui en haut de page), et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Vous aurez alors l'option « Créer un nouveau dossier ».

Branchement à un ordinateur

Vous avez la possibilité de brancher votre VoxiOne à un ordinateur. Reliez le câble USB Type-C fourni entre le port USB Type-C de votre VoxiOne (situé sur la tranche du bas, au milieu) et le port USB de votre ordinateur.

A noter que votre VoxiOne doit être allumé et pas en veille.

Une fois branché (votre appareil s'appellera VoxiOne sur votre ordinateur), vous aurez alors accès au contenu du Stockage interne sur votre ordinateur. Vous pouvez copier des fichiers de votre VoxiOne vers un ordinateur et inversement, transférer des fichiers de votre ordinateur vers votre VoxiOne.

Sur Mac, il faut au préalable télécharger un programme qui s'appelle Android File Transfer (<https://www.android.com/filetransfer>) pour effectuer la liaison.

Gestionnaire de téléchargements

La rubrique Gestionnaire de téléchargements vous permet de suivre les téléchargements effectués depuis Voxiweb (podcast, livre audio, pièce-jointe emails...).

Par défaut, les fichiers téléchargés sont sauvegardés dans le dossier Téléchargements (accessible depuis le Lecteur Multimédia). Pour les podcasts et les livres audios, les fichiers sont eux directement téléchargés dans les dossiers Podcasts et Livres.

Pour effacer un ou plusieurs téléchargements de la liste, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options puis choisissez « Retirer de la liste » ou « Retirer tous les téléchargements terminés ».

OUTILS

Agenda

Pour créer un nouvel évènement, choisissez « Créer nouvel évènement ». Vous devez indiquer la date et l'heure et avez la possibilité d'activer le rappel 15 minutes avant la date de votre tâche.

Vous avez également la possibilité de créer un évènement dont la date est déjà passée. Dans ce cas, une notification vous informera de cet état.

Sont ensuite listés l'ensemble de vos évènements à venir, classés par date du plus proche au plus lointain.

Pour consulter un évènement, sélectionnez-le avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans un évènement, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors modifier ou supprimer l'évènement.

Vous disposez également d'une fonction de recherche sur les évènements à venir.

Pour lister les évènements déjà passés : à partir de l'accueil de l'agenda, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options et choisissez « Afficher les évènements passés ».

Notes

Pour créer une nouvelle note, choisissez « Créer une nouvelle note ». Saisissez le titre, votre texte et descendez le curseur jusqu'à « Ajouter », validez avec le bouton du milieu.

Sont ensuite listées l'ensemble de vos notes, classées par date de modification de la plus récente à la plus ancienne.

Pour consulter une note, sélectionnez la note avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans une note, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors modifier le titre, modifier le texte ou supprimer la note.

Vous avez également la possibilité d'exporter votre note :

- Au format texte : sauvegardée dans le dossier Notes (Stockage interne > Documents)

- Au format audio (lue par la synthèse vocale) : sauvegardée dans le dossier Notes (Stockage interne > Musique)

Alarme

Pour créer une alarme, vous devez indiquer l'heure et les minutes. Vous avez également la possibilité de régler la récurrence (en semaine, tous les jours, tous les lundis...). Dans ce cas, l'alarme s'exécutera automatiquement à l'intervalle choisi.

VoxiOne supporte la gestion de plusieurs alarmes simultanées, vous pouvez donc en créer autant que vous le souhaitez.

Pour consulter une alarme, sélectionnez l'alarme avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans une alarme, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors la désactiver, la modifier ou la supprimer.

Si vous avez au moins une alarme en cours, une notification apparaîtra sur le menu du VoxiOne (appui prolongé sur le bouton Marche / Arrêt) et affichera la prochaine alarme enregistrée.

Minuteur

Pour créer un minuteur, vous pouvez spécifier le nombre d'heures et / ou de minutes et / ou de secondes.

Une fois le minuteur créé, celui-ci tourne en arrière-plan et vous pouvez continuer à utiliser votre VoxiOne. Si vous souhaitez arrêter le minuteur, retournez dans le Minuteur et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options et choisissez « Arrêtez le minuteur ».

Dès que le minuteur sera arrivé à son terme, votre VoxiOne se mettra à vibrer et sonner progressivement. Appuyez sur le bouton du milieu pour l'arrêter.

Tant que votre minuteur est actif, si vous appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche / Arrêt, vous aurez à l'écran une notification vous indiquant qu'un minuteur est en cours.

Calculatrice

Les boutons de la barre de navigation changent.



- **Bouton gauche** : Réécouter résultat
- **Bouton milieu** : Egal (résultat opération)
- **Bouton droite** : Supprimer caractère

La calculatrice fonctionne avec le clavier T9.

Les opérateurs (addition, soustraction, multiplication, division) sont situés à droite du 0.
La virgule (qui est énoncée comme un point) et les parenthèses sont situées à gauche du 0.

Lampe torche

Une fois dans la rubrique Lampe Torche, celle-ci s'allume automatiquement. Dès que vous quittez la rubrique Lampe Torche, celle-ci s'éteint.

DICTAPHONE

Pour créer un nouvel enregistrement, sélectionnez « Créer nouvel enregistrement ». L'enregistrement démarrera automatiquement. Pour le terminer, appuyez sur le bouton du milieu.

Sont ensuite listés l'ensemble de vos enregistrements, classés du plus récent au plus ancien. Pour consulter un enregistrement, sélectionnez l'enregistrement avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Les boutons de la barre de navigation fonctionnent alors comme pour le lecteur multimédia.



- **Bouton gauche** : Retour rapide
- **Bouton milieu** : Lecture / Pause
- **Bouton droite** : Avance rapide

Une fois dans un enregistrement, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors modifier le titre, modifier le texte ou supprimer l'enregistrement.

Il n'y a pas de limite de durée d'enregistrement (uniquement celle de votre stockage interne restant).

APPAREIL PHOTO

Dès que vous entrez dans la rubrique Appareil Photo, votre VoxiOne vous indique « Appareil photo allumé ».

A ce moment-là, les boutons de la barre de navigation changent.



- **Bouton gauche** : Zoom moins
- **Bouton milieu** : Prise de vue / Démarrer - arrêter enregistrement vidéo
- **Bouton droite** : Zoom plus

L'appareil photo propose 3 modes :

- Mode photo : prise de photo avec le capteur situé au dos du VoxelOne (mode par défaut)
- Mode selfie : prise de photo avec le capteur frontal situé sur la façade avant du VoxelOne
- Mode vidéo : enregistrement de vidéo avec le capteur situé au dos du VoxelOne

Une fois dans l'appareil photo, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Vous pourrez alors changer de mode (photo, selfie, vidéo) ou modifier les paramètres du flash (automatique, activer, désactiver).

A partir des options, vous pourrez également accéder rapidement à la Galerie photos.

Les photos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans Lecteur multimédia > Photos > Appareil photo.

Les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans Stockage Interne > Vidéos > Appareil photo.

VOXIWEB

Avec votre VoxiOne, est inclus 1 an d'abonnement à Voxiweb (valeur 99€).

L'offre est gratuite et sans aucun engagement.

Voxiweb propose un accès simplifié à de nombreux contenus et services Internet :

- Emails
- Presse *
- Radio / Musique : Radios, podcasts, Spotify, paroles de chanson
- TV / Vidéo : Programmes TV, TV en direct *, replays *, Youtube
- Livres audio (dont un accès à Eole)
- Vie pratique : Annuaire téléphonique, météo, horoscope, transports, bureautique, santé
- Loisirs / Culture : Dictionnaires, recettes de cuisine, jeux, sorties...

* Pour des raisons légales, certains contenus nécessitent un justificatif (carte d'invalidité ou attestation du médecin).

Pour démarrer votre offre gratuite, rendez-vous dans la rubrique Voxiweb puis choisissez « Je suis un nouvel utilisateur : inscription ». Remplissez le formulaire puis descendez le curseur jusqu'à « S'inscrire » et validez avec le bouton du milieu.

Votre 1^{ère} année commence au moment de votre inscription.

Si vous êtes déjà abonné à Voxiweb, vous pouvez vous identifier en choisissant la rubrique « Je suis déjà inscrit à Voxiweb : Identification ».

Une rubrique Aide dédiée à Voxiweb est disponible dans la rubrique Voxiweb puis Aide / Contact.

4/ TELEPHONIE

Les fonctions ci-dessous sont disponibles uniquement si vous insérez une carte SIM dans votre VoxiOne.

Téléphone

Passer un appel

Pour passer un appel, allez dans la rubrique Téléphone puis Composer.

- Si vous êtes en clavier T9, composez votre numéro (voir Chapitre Saisie de texte) puis appuyez sur le bouton du milieu « Valider » pour lancer l'appel
- Si vous êtes en clavier 3 touches, composez votre numéro (voir Chapitre Saisie de texte), puis fermez le clavier et descendez le curseur jusqu'à « Valider »




DITES

« **appeler suivi du numéro de téléphone** » : ex « appeler 02 40 50 60 70 »

« **appeler suivi du nom du contact** » : ex « appeler Martin » (uniquement si le contact existe dans le répertoire)

Une fois votre appel en cours, la synthèse vocale vous annoncera, pour confirmation, le numéro qui a été composé ou le nom du contact, puis établira l'appel.

A ce moment-là, les boutons de la barre de navigation changent.

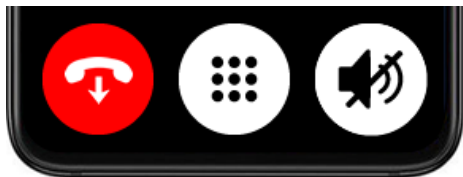

- **Bouton gauche** : Raccrocher
- **Bouton milieu** : Afficher / masquer le clavier (utile avec les serveurs vocaux, la messagerie)
- **Bouton droite** : Activer / désactiver le haut-parleur (appui court), Activer / désactiver le micro (appui long)

A noter que la reconnaissance vocale fonctionne également lors d'un appel.



DITES

« **raccrocher** » : terminer un appel (ne fonctionne pas quand le clavier est ouvert)

« **dièse** » ou « **étoile** » : compose un dièse ou étoile

Réception appel

Lors de la réception d'un appel, le numéro de téléphone ou le nom du contact (si le numéro correspond à un contact dans le répertoire) sera annoncé par la synthèse vocale.

A noter enfin que la réception des appels fonctionne même lorsque vous êtes en mode Loupe.

A ce moment-là, les boutons de la barre de navigation changent.



- **Bouton gauche** : Raccrocher
- **Bouton milieu** : Aucun
- **Bouton droite** : décrocher

Vous pouvez appeler un favori à partir de l'accueil de la rubrique Téléphone, en choisissant la rubrique « Appeler un favori ». Il faudra au préalable ajouter un contact dans vos favoris (voir la section Contacts).

Historique appels

L'historique de vos appels vous indique les appels passés, reçus et manqués. Les appels manqués sont regroupés dans le premier menu « Appels manqués », et sont indiqués individuellement par un astérisque devant le numéro de téléphone.

Pour consulter l'historique d'un appel, sélectionnez le numéro avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans un appel, vous pourrez appeler le numéro, envoyer un SMS, ajouter le numéro à un contact (nouveau ou existant) ou supprimer de l'historique.

Pour supprimer l'intégralité de l'historique, faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options au niveau de la rubrique Historique des appels et sélectionnez « Vider l'historique ».

Messagerie

En cas de nouveau message vocal, le menu Téléphone affichera la mention (nouveau message vocal). Pour consulter votre messagerie, rendez-vous dans la rubrique Téléphone puis Messagerie.



DITES

« **messagerie** » : appelle la messagerie

Messages (SMS & MMS)

Envoi SMS

Pour envoyer un nouveau message (SMS), choisissez la rubrique Messages puis « Envoyer un nouveau message ». Sélectionnez ensuite le destinataire parmi vos contacts favoris, vos contacts ou entrez un numéro (voir le chapitre Saisie de texte). Composez votre message, descendez le curseur jusqu'à « Envoyer » et validez avec le bouton du milieu.



DITES

« **envoyer un message au suivi du numéro de téléphone** » : ex « envoyer un message au 06 60 15 25 35 »

« **envoyer un message à suivi du nom du contact** » : ex « envoyer un message à Béatrice » (uniquement si contact existe dans le répertoire)

Sont ensuite listés l'ensemble de vos messages, classés du plus récent au plus ancien. Ceux-ci sont regroupés en conversations entre vous et votre correspondant.

En cas de message non lu, une mention « Non lu » sera indiquée juste après le numéro de l'expéditeur ou le nom (si le numéro a été ajouté aux contacts).

Lecture SMS

Lors de la réception d'un SMS, la synthèse vocale vous notifie de la réception d'un nouveau message (annonce du numéro ou nom de l'expéditeur + contenu du message). Vous pouvez personnaliser le niveau de confidentialité des notifications (voir Chapitres Paramètres).

Pour consulter les options d'une conversation, positionnez le curseur sur la conversation souhaitée et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. A partir de cet écran, vous pourrez supprimer une conversation (c'est-à-dire l'ensemble des messages entre vous et votre correspondant), appeler votre correspondant ou ajouter le numéro de votre correspondant à vos contacts.

Pour consulter le détail d'une conversation, entrez dans une conversation avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans une conversation, vous pouvez consulter l'intégralité des messages échangés entre vous et votre correspondant sur un seul et même écran.

Pour répondre à votre expéditeur, sélectionnez le choix « Répondre » en haut de liste.

Si vous souhaitez transférer un message, positionnez le curseur sur le message souhaité et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options et choisissez l'option Transférer.

Pour supprimer un message, positionnez le curseur sur le message souhaité et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options et choisissez l'option Supprimer message.

Envoi MMS

Pour envoyer un MMS, la procédure est un peu différente. A noter que le VoxiOne ne gère pour l'instant que l'envoi d'image.

Accédez à la rubrique Lecteur Multimédia puis Photos. Choisissez la photo que vous souhaitez envoyer. Positionnez le curseur sur la photo choisie (sans l'ouvrir), et faites un appui avec 2 doigts pour accéder aux options. Sélectionnez l'option « Envoyer par MMS », puis choisissez le destinataire parmi vos contacts favoris, vos contacts ou entrez un numéro (voir le chapitre Saisie de texte).

Lecture MMS

Lors de la réception d'un MMS, ce message sera indiqué avec la mention [Image]. Pour consulter la photo envoyée, sélectionnez le message et validez avec le bouton du milieu. Vous aurez alors la possibilité de vous déplacer au sein d'une photo et l'agrandir / réduire, en pinçant vos doigts sur l'écran. En cliquant sur le bouton en bas à droite, vous pourrez sauvegarder la photo sur le stockage interne de votre VoxiOne (dossier Photos > MMS).

Contacts

Créer contact

Pour créer un nouveau contact, choisissez la rubrique Contacts puis « Nouveau contact ». Une fiche contact comporte le nom, 2 numéros (ainsi que le type de numéro), un champ Email et Notes. Seuls le nom et le numéro de téléphone 1 sont obligatoires. Vous pouvez également attribuer une sonnerie personnalisée à un contact. Descendez le curseur jusqu'à « Ajouter » et valider avec le bouton du milieu.



DITES

« **nouveau contact** » : créer un nouveau contact

Sont d'abord proposés vos contacts Favoris, puis la liste de tous vos contacts classés par ordre alphabétique.

Détails contact

Pour accéder aux détails d'un contact, sélectionnez la rubrique Tous les contacts puis le nom du contact avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans un contact, vous pouvez consulter les différentes informations.

Si vous positionnez le curseur sur le numéro d'un contact et validez avec le bouton du milieu, vous pouvez directement appeler ce numéro ou envoyer un message.

Une fois dans un contact, en appuyant avec 2 doigts sur l'écran vous allez pouvoir accéder aux options de ce contact. A partir de ce nouvel écran, vous allez pouvoir Modifier, Ajouter aux favoris ou Supprimer.

Contacts favoris

Cette rubrique regroupe tous vos contacts favoris. Ces contacts préférés seront également accessibles dans la rubrique Téléphone et Messages.

Pour ajouter un contact à un favori, veuillez suivre la procédure ci-dessus.

Pour supprimer un contact de vos favoris, il faut se rendre de nouveau sur le contact puis sur l'écran d'options et choisir « Supprimer des favoris ».

Importation / exportation

Vous avez la possibilité d'importer des contacts vers votre VoxiOne de 3 manières :

- Depuis votre carte SIM : Avant l'importation, votre VoxiOne vous informe du nombre de contacts détecté sur la carte SIM
- Importer depuis Voxiweb : Si vous avez un compte Voxiweb, vous avez la possibilité d'importer vos contacts enregistrés dans Voxiweb
- Depuis le Stockage interne : Copiez dans un premier temps, un fichier .vcf (format vCard) dans le dossier Documents du Stockage interne puis choisissez cette option. Sera alors listé le nom du fichier vcf. Si vous validez ce fichier, le processus d'importation démarrera.

L'exportation des contacts s'effectue au format .vcf (format universel d'échange de contacts disponible sur la plupart des téléphones / smartphones et messageries) et sera stockée dans le dossier Documents du Stockage Interne.

5/ SAISIE DE TEXTE

VoxiOne vous propose plusieurs manières de saisir du texte : avec l'un des 2 claviers (T9 ou 3 touches) ou à l'aide de la reconnaissance vocale.

Choix du clavier (T9 ou 3 touches)

Pour choisir votre clavier, allez dans la rubrique Paramètres > Accessibilité > Choix du clavier.



DITES

« **clavier** » : choisir le clavier de saisie (T9 ou 3 touches)

Clavier T9


Le clavier T9 est composé de 12 touches situées sur la partie supérieure de l'écran, au-dessus de la barre de navigation.

Le système T9 combine chiffre et lettres sur une même touche. En appuyant plusieurs fois sur une même touche, vous faites défiler d'abord les lettres minuscules puis majuscules et enfin le chiffre associé.

Par exemple :

- Appuyez 1 fois sur la touche DEF pour insérer le caractère d minuscule
- Appuyez 3 fois sur la touche DEF pour insérer le caractère f minuscule

- Appuyez 4 fois successifs sur la touche DEF pour insérer le caractère D majuscule
- Pour insérer le chiffre 3, appuyez 7 fois sur la touche DEF ou faites un appui long

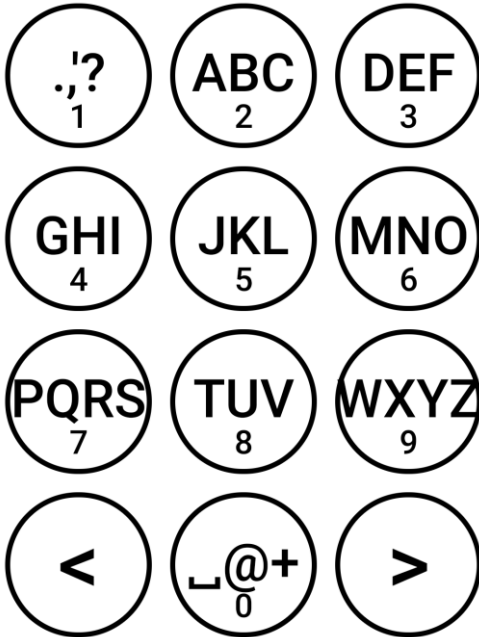

Vous pouvez également explorer le clavier au toucher. Laissez votre doigt appuyé sur l'écran et déplacez-le sur l'écran, à chaque nouvelle touche rencontrée par votre doigt, la synthèse vocale vous l'annoncera.

Uniquement sur le clavier numérique (pour composer un numéro de téléphone par exemple), quand vous relâchez votre doigt, le chiffre sous lequel se trouve votre doigt, sera inséré.

Pour commencer votre saisie de texte, il faut au préalable ouvrir le clavier. Quand vous êtes dans un champ de texte, appuyez sur le bouton du milieu. Vous entendrez alors « Clavier ouvert », le clavier T9 apparaîtra alors à l'écran.

En mode saisie de texte, les boutons de la barre de navigation changent.



- **Bouton gauche** : Réécouter le texte saisi
- **Bouton milieu** : Valider le texte et fermer le clavier
- **Bouton droite** : Suppression caractères (appui court), suppression de tous les caractères (appui long)

Déplacement mot par mot, caractère par caractère

Les touches à droite et à gauche du 0 vous permettent de vous déplacer dans le texte :

- 1 appui simple effectue un déplacement de caractère en caractère
- 2 appuis successifs effectuent un déplacement de mot en mot

Clavier 3 touches

Le clavier 3 touches est un clavier simplifié. Le principe est de faire défiler les caractères à l'aide des flèches (bouton droit et gauche) et de valider l'insertion d'un caractère avec le bouton du milieu. Le caractère en cours est affiché en gros au-dessus de la barre de navigation.

Par défaut, le clavier s'ouvre en mode minuscules. Pour changer de mode de saisie, appuyez avec 2 doigts sur l'écran jusqu'à entendre le mode de saisie que vous désirez.

Le clavier propose 7 modes de saisie :

- Minuscules
- Majuscules
- Caractères accentués
- Chiffres
- Ponctuation
- Symboles
- Edition

Le mode édition permet de se déplacer dans le texte saisi, et d'effacer des caractères.

Pour commencer votre saisie de texte, il faut au préalable ouvrir le clavier. Quand vous êtes dans un champ de texte, appuyez sur le bouton du milieu. Vous entendrez alors « Clavier ouvert », le clavier 3 touches apparaîtra alors à l'écran.

En mode édition, les boutons de la barre de navigation changent.



- **Bouton gauche :**
Déplacer de caractère en caractère vers la gauche : appui simple
Déplacer de mot en mot vers la gauche : 2 appuis successifs
- **Bouton milieu :** Effacer un caractère
- **Bouton droite :**
Déplacer de caractère en caractère vers la droite : appui simple
Déplacer de mot en mot vers la droite : 2 appuis successifs

Gestes rapides pour supprimer un caractère ou insérer un espace (en dehors du mode édition) :

- Supprimer un caractère, faites un balayage avec un doigt de la droite vers la gauche
- Insérer un espace, faites un balayage avec un doigt de la droite vers la gauche

Pour réécouter le texte saisi, faites 2 appuis successifs avec un seul doigt au-dessus de la barre de navigation.

Pour fermer le clavier, appuyez de manière prolongée sur le bouton du milieu. La synthèse vocale vous indiquera alors « Clavier fermé ».

Reconnaissance vocale

La reconnaissance vocale est disponible dans tous les champs de texte. Pour la lancer, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale situé sur la tranche gauche de votre VoxelOne.

Une fois que vous entendez un bip sonore (une animation avec un clavier se lance), vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s'arrête dès que vous arrêtez de parler.

Vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale dans un champ de texte autant de fois que vous le souhaitez.

Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer du texte dicté en ouvrant le clavier. Pour cela, appuyez sur le bouton du milieu de la barre de navigation.

La reconnaissance vocale fonctionne sans Internet et peut donc être utilisée dans des cas très pratiques : saisie du code SIM...

Clavier (filaire / sans-fil ou Bluetooth)

Vous pouvez enfin brancher un clavier externe :

- Filaire / sans-fil : Branchez l'adaptateur USB Type-C vers Type-A (fourni dans la boîte d'Accessoires) dans le port USB situé sur la tranche du bas de votre VoxelOne, puis branchez-y le clavier USB ou le récepteur USB de votre clavier.
- Bluetooth : Connectez votre clavier Bluetooth à partir de la rubrique Paramètres > Connexions sans-fil > Bluetooth (voir Chapitre Paramètres).

Pour le clavier filaire / sans-fil, le choix de la disposition du clavier (azerty...) est disponible dans la rubrique Paramètres > Système > Configuration clavier physique.

Pour le clavier Bluetooth, le choix de la disposition du clavier (azerty...) est disponible directement en accédant aux options du périphérique Bluetooth.

Les formulaires

Dans les formulaires, vous allez rencontrer 2 types de champ de texte.

Champ de saisie

A chaque fois qu'il est possible de saisir du texte, le bouton du milieu (dans la barre de navigation) est alors représenté par la lettre A (en majuscules et minuscules).



La synthèse vocale vous indique également « Champ texte suivi du nom du champ » (ex : « Champ texte téléphone »).

Pour ouvrir le clavier (T9 ou 3 touches), appuyez sur le bouton du milieu. La synthèse vocale vous indiquera alors « Clavier ouvert ».

Listes

Dans ce cas, le bouton du milieu reste le même et la synthèse vocale vous indique « Liste suivi du nom de la liste » (ex : « Liste Type téléphone ») et le cas échéant, si vous avez sélectionné une

valeur dans la liste, cette valeur (ex : « Domicile »). Ce qui donne au final « Liste Type téléphone Domicile ».

Pour accéder aux différentes valeurs d'une liste, appuyez sur le bouton du milieu. Pour sortir de cet écran, choisissez une des valeurs à l'aide des flèches de la barre de navigation puis du bouton du milieu ou faites un geste Retour pour retourner au formulaire.

Bouton

En bas de chaque formulaire, se trouve un bouton de validation. En positionnant le curseur dessus et en validant avec le bouton du milieu, vous soumettez le formulaire.

6/ COMMANDES VOCALES

Pour lancer une commande vocale, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale, situé sur la tranche gauche de votre VoxiOne. Une fois que vous entendrez un bip sonore (une animation micro se lance), vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s'arrête dès que vous arrêtez de parler.

Attention, la commande vocale ne fonctionne pas si vous êtes dans un champ de formulaire.

La commande vocale vous permet d'accomplir de nombreuses tâches : modifier un paramètre, connaître l'heure, le niveau de batterie, lancer un appel, zoomer dans la loupe, lancer les applications...

La liste complète des commandes vocales est disponible dans Aide > Commandes vocales



DITES

« **commandes vocales** » : lister toutes les commandes vocales

Navigation

- « **loupe** » : lance le mode loupe
- « **smartphone** » / « **application** » : lance le mode Smartphone ou Applications (si pas de carte SIM)
- « **accueil** » : retourner à l'accueil

- « **retour** » : revenir à l'écran précédent
- « **option** » : accéder aux options
- « **veille** » : mettre en veille
- « **éteindre** » : éteindre

Informations

- « **quelle heure est-il** » : connaître l'heure
- « **batterie** » : indique le niveau de batterie
- « **réseau** » : informations sur le réseau mobile et la puissance
- « **volume** » : indique le volume actuel

Paramètres

- « **contraste** » : changer le contraste
- « **taille texte** » : changer la taille du texte
- « **synthèse vocale** » : changer la synthèse vocale ou la désactiver
- « **vitesse de lecture** » : régler la vitesse de lecture

- « **luminosité** » : régler la luminosité
- « **clavier** » : accéder au choix du clavier
- « **wifi** » : accéder au Wi-Fi
- « **bluetooth** » : accéder au Bluetooth
- « **volume x%** » : régler le volume à x%
- « **muet** » : couper le volume
- « **sonnerie** » : activer la sonnerie
- « **vibreur** » : remplacer la sonnerie par le vibreur
- « **silencieux** » : désactiver la sonnerie et le vibreur

Lancer une application

- « **zoom x** » : en mode Loupe, choisir le niveau de zoom
- « **scan** » : en mode Loupe, lancer la reconnaissance de texte (OCR)
- « **mode lot** » : en mode Loupe, lancer le mode lot
- « **code barres** » : lancer le lecteur de code-barres
- « **lecteur d'étiquettes** » : lancer le lecteur d'étiquettes
- « **détecteur de couleurs** » : lancer le détecteur de couleurs

- « **détecteur de lumière** » : lancer le détecteur de lumière
- « **alarme** » : lancer l'alarme
- « **minuteur** » : lancer le minuteur
- « **notes** » : lancer le bloc-notes
- « **dictaphone** » : lancer le dictaphone
- « **torche** » : lancer la lampe torche
- « **appareil photo** » : lancer l'appareil photo
- « **voxiweb** » : lancer Voxiweb
- « **stockage interne** » ou « **clé usb** » : accéder au stockage interne ou lecteur USB
- « **aide** » : lancer l'aide

Fonctions Téléphonie

- « **appeler suivi du numéro** » : appeler un numéro
- « **appeler suivi du nom du contact** » : appeler un contact
- « **envoyer un SMS à suivi du numéro** » : envoyer un SMS au numéro
- « **envoyer un SMS à suivi du nom du contact** » : envoyer un SMS au contact
- « **messagerie** » : accéder à la messagerie

- « **appels manqués** » : accéder à la liste des appels manqués
- « **nouveau contact** » : créer un nouveau contact
- « **lettre x** » : au niveau des contacts, permet d'atteindre les contacts commençant par x

Saisie de texte

- « **virgule** » : insertion d'une virgule
- « **point** » : insertion d'un point
- « **point d'interrogation** » : point d'interrogation
- « **point d'exclamation** » : point d'exclamation
- « **à la ligne** » : saut de ligne
- « **nouveau paragraphe** » : insertion d'un nouveau paragraphe

7/ PARAMETRES

Tous les paramètres ci-dessous sont accessibles depuis la rubrique Paramètres.

ACCESSIBILITE

Votre VoxiOne s'adapte entièrement à vous.

En mode Loupe, les paramètres sont accessibles en faisant un appui avec 2 doigts sur l'écran d'accueil puis en sélectionnant le menu Paramètres.

En mode Applications / Smartphone, vous pouvez y accéder dans la rubrique Paramètres > Accessibilité.

Contraste

Choix parmi 6 contrastes : Texte blanc sur fond noir, Texte noir sur fond blanc, Texte jaune sur fond bleu, Texte bleu sur fond jaune, Texte jaune sur fond noir, Texte noir sur fond jaune

Taille du texte

Choix parmi 6 tailles : Normal (x1), Moyen (x1,5), Grand (x2), Très grand (x2,5), Très très grand (x3,5), Enorme (x5)

Espacement du texte

Choix parmi 3 tailles : Normal, Espacé, Très espacé

Synthèse vocale

Choix parmi 4 voix (3 voix Femme et 1 voix Homme).
Possibilité de désactiver / activer la synthèse vocale.

Vitesse de lecture (de la synthèse vocale)

Choix parmi 6 vitesses : x0,5, x0,75, x1, x1,25, x1,5, x2

Choix du clavier

Choix parmi : T9, 3 touches

Options avancées

- Disposition du texte : Paragraphe (mode par défaut) ou sur une seule ligne
- Numérotation navigation : Affichage (par défaut) ou non d'un numéro devant chaque choix
- Messages de confirmation : Fermeture automatique des messages de confirmation
- Navigation rapide : Défilement plus rapide dans les listes en cas d'appui prolongé sur les flèches haut ou bas

CONNEXIONS SANS FIL

Réseau mobile

Disponible uniquement si une carte SIM a été détectée.

Cette rubrique vous indique le nom de votre réseau mobile et sa puissance.

Vous avez la possibilité de désactiver / activer les données mobiles (Internet, MMS). Si l'on désactive les données mobiles, alors les fonctions Internet et MMS seront désactivées ; seuls les appels et SMS fonctionneront.

Wi-Fi



DITES

« **wifi** » : accéder au Wi-Fi

Vous pouvez également accéder rapidement à la gestion du Wi-Fi, en faisant un appui long sur le bouton Marche / Arrêt puis Connexions sans-fil.

Sont listés dans cette rubrique l'ensemble des réseaux Wi-Fi détectés autour de votre VoxiOne.

Pour vous connecter à un réseau, sélectionnez le nom du réseau avec les flèches de la barre de navigation et validez avec le bouton du milieu. Une fois dans un réseau, saisissez la clé Wi-Fi dans le champ texte, puis validez. Si la clé Wi-Fi est correcte, la connexion s'établira automatiquement.

Si vous sélectionnez un nom de réseau sur lequel vous êtes connecté, en entrant dans ce réseau, vous avez la possibilité de le supprimer en choisissant l'option « Oublier le réseau ».

Les réseaux déjà enregistrés sont indiqués par « (enregistré) » après le nom du réseau. En entrant dans ce réseau, vous avez la possibilité de vous y connecter, de modifier la clé ou de le supprimer.

Vous avez également la possibilité de désactiver / activer complètement le Wi-Fi.

Bluetooth



DITES

« **bluetooth** » : accéder au Bluetooth

Vous pouvez également accéder rapidement à la gestion du Bluetooth, en faisant un appui long sur le bouton Marche / Arrêt puis Connexions sans-fil.

Par défaut le Bluetooth est désactivé, il faut donc choisir le menu « Activer le Bluetooth ».

Si vous souhaitez ajouter un nouvel appareil Bluetooth, choisissez « Associer un nouvel appareil ». Votre VoxiOne va alors balayer tous les périphériques Bluetooth qu'il détecte, l'opération prend environ 20 secondes. Sélectionnez le nom du périphérique avec les flèches de la barre de

navigation et validez avec le bouton du milieu. Dans certains cas, un code de sécurité vous sera demandé, il suffit alors de le saisir.

Sont listés ensuite les appareils associés. En entrant dans un périphérique, vous avez la possibilité de choisir la disposition des touches (uniquement pour les claviers), de le déconnecter ou de le dissocier.

Mode avion



DITES

« **mode avion** » : accéder au Mode avion

Le mode avion vous permet de couper toutes les connexions sans-fil (réseaux mobiles, Wi-Fi et Bluetooth) ainsi que toutes les communications téléphoniques.

Si le mode avion est activé, une notification apparaîtra sur le menu du VoxiOne (appui prolongé sur le bouton Marche / Arrêt).

Partage de connexion

Disponible uniquement si une carte SIM a été détectée.



DITES

« **partage de connexion** » : accéder au Partage de connexion

Pour démarrer le partage de votre connexion, vous devez activer le partage de connexion en sélectionnant le choix « Activer ».

Le nom du point d'accès ainsi que la clé Wi-Fi sont automatiquement attribués et ne peuvent pas être personnalisés. Cet écran vous indique également le nombre d'appareils connectés à votre point d'accès.

SYSTEME

Date et heure

Par défaut, la date et l'heure sont réglées automatiquement. Vous avez la possibilité de désactiver cette option et de choisir manuellement la date et l'heure.

Luminosité

Cette rubrique vous permet de régler le niveau de luminosité (entre 1 et 8).

A noter que la désactivation complète de l'écran n'est pas possible.

Mode sonnerie (uniquement si carte SIM)

Le VoxiOne propose 3 modes de sonnerie.

- Sonnerie + vibreur (mode par défaut)
- Vibreur seul
- Silencieux

Vous pouvez également accéder rapidement au mode Sonnerie, en faisant un appui long sur le bouton Marche / Arrêt.

Sonneries et notifications (uniquement si carte SIM)

Cette rubrique vous permet de régler le volume de la sonnerie (indépendant du volume de la synthèse vocale), de choisir la sonnerie (12 différentes) ou de choisir le niveau de confidentialité des notifications pour les messages (SMS & MMS reçus).

Délai de mise en veille

Cette rubrique vous permet de régler le délai avant la mise en veille automatique de votre appareil.

Mode de démarrage

Cette rubrique vous permet de choisir si vous souhaitez démarrer votre VoxiOne en mode Loupe ou en mode Applications / Smartphone.

APPAREIL

Mises à jour

A partir de cette rubrique, vous allez pouvoir vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible (vous devez être connecté à Internet).

Lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, un nouveau choix dans le mode Applications / Smartphone vous sera automatiquement proposé en haut de liste, afin de mettre à jour votre VoxiOne. Validez ce choix pour lancer le processus de mise à jour.

Celle-ci va s'installer automatiquement, vous n'avez donc rien à faire.

Effacer les données

A partir de cette rubrique, vous allez pouvoir effacer vos données (tous les messages, tous les contacts, toutes les étiquettes, tous les événements de l'agenda).

AIDE / SUPPORT

Quel que soit le mode, la rubrique Aide est accessible en permanence en faisant un appui long sur le bouton Marche / Arrêt.



DITES

« **aide** » : lancer le Manuel utilisateur

La rubrique Aide propose l'intégralité du Manuel de l'utilisateur et un accès rapide à l'ensemble des commandes vocales. La liste des nouveautés des différentes mises à jour est également consultable dans cette rubrique.

En cas de difficultés avec votre VoxiOne, vous pouvez consulter la rubrique Diagnostic qui vous propose de consulter sur un seul écran toutes les informations sur l'état de votre appareil (IMEI, numéro de série, données mobiles, état du Wi-Fi, état du Bluetooth...). En complément, vous pouvez effectuer un test de débit de votre connexion Internet.

En cas de questions ou de problèmes, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou à nous contacter :

- Par téléphone : **02 85 52 94 97** (du lundi au vendredi de 9h à 13h)
- Par email : **contact@voxiweb.com**



www.voxione.com